


Utilisez une lancette stérile OneTouch® Delica® neuve pour chaque test afin de rendre le prélèvement pratiquement indolore.

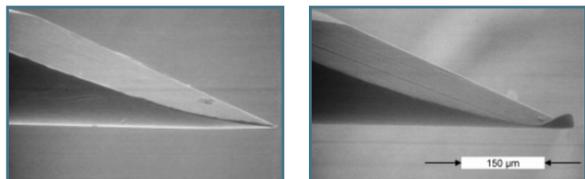

Après un usage

Lancette neuve et utilisée après une seule pénétration dans la peau¹

Ces images viennent d'une publication qui offre un aperçu de prélèvements qui ne sont pas représentatifs d'un appareil OneTouch® quelconque. La réutilisation d'une lancette peut émousser ou plier la pointe de la lancette, pouvant causer des dommages à la peau, des cicatrices et plus de douleur.

Une lancette par test pour une expérience de prélèvement confortable



NOUVEAU

Contactez-nous pour en savoir plus

-  Visitez [OneTouch.be](https://www.onetouch.be)
-  Email contact@onetouch.be

-  Appelez le Service à la Clientèle OneTouch® 0800 14660

Pratiquement sans douleur

Réalisation d'un test de glycémie avec le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus


Fonctionne également avec les lancettes OneTouch® Delica®

Guide de démarrage 

1. Heinemann L, Boecker D. Lancing: Quo Vadis? Journal of Diabetes Science and Technology 2011;5(4):966-981.

Conseils pour aider à rendre les tests de glycémie moins douloureux et à réduire le risque d'infection

- Avant de tester, lavez les mains et le site de prélèvement avec de l'eau chaude et du savon. Rincez et séchez complètement. Des contaminants sur la peau peuvent influencer les résultats.
- Utilisez une lancette stérile neuve à chaque prélèvement. Ne pas réutiliser.
- Pincez et/ou massez délicatement le bout du doigt jusqu'à ce qu'une goutte de sang ronde se forme.

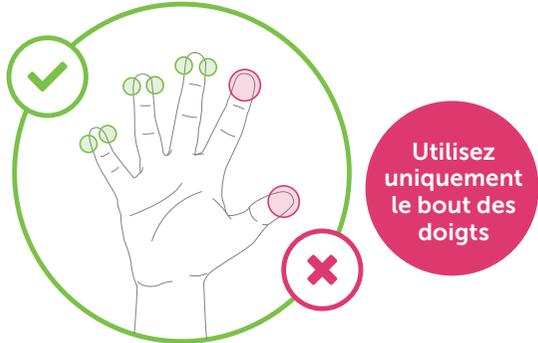

- Appuyez le stylo autopiqueur contre le côté de la partie supérieure du doigt.
- Choisissez un site de prélèvement différent à chaque test. Des piqûres répétées au même endroit peuvent causer des douleurs et des callosités.
- Ne partagez jamais une lancette ou un stylo autopiqueur avec quelqu'un. Utilisation pour un seul patient.

Préparer votre stylo autopiqueur



1 Enlevez le capuchon du stylo autopiqueur



2 Insérez la lancette stérile dans le stylo autopiqueur et enlevez la protection



3 Remplacez le capuchon sur le stylo autopiqueur



4 Ajustez le réglage profondeur

Les chiffres plus bas sont pour les piqûres moins profondes et les chiffres plus hauts pour les piqûres plus profondes.



5 Armez le stylo autopiqueur en glissant le bouton vers l'arrière jusqu'au cliquer

Vous pouvez prélever maintenant

Prélever et disposer de la lancette usagée



1 Piquez votre doigt

Tenez le stylo fermement contre le côté de votre doigt. Appuyez sur le bouton de déclenchement pour piquer.



2 Appliquez l'échantillon

Appliquez l'échantillon de sang selon les instructions du manuel d'utilisation de votre OneTouch® pour une application correcte de l'échantillon.



3 Enlevez à nouveau le capuchon du stylo autopiqueur



4 Couvrez la pointe exposée de la lancette

Placez la protection de la lancette sur une surface dure et poussez la pointe de la lancette dans le côté plat du disque.



5 Ejectez la lancette

En tenant le stylo autopiqueur vers le bas, faites glisser le bouton vers l'avant jusqu'à ce que la lancette sorte. Remplacez le capuchon sur le stylo.



6 Remplacez le capuchon du stylo autopiqueur

Jetez prudemment la lancette usagée après chaque utilisation afin d'éviter des accidents de piqûre involontaires.

Lisez attentivement le manuel d'utilisation du lecteur OneTouch® et les notices livrées avec le système avant d'utiliser le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus pour effectuer un test de glycémie.