




Configuration de l'appli mobile OneTouch Reveal®


avec Android


ONETOUCH®


Etape 1 : Télécharger l'appli mobile

A  Trouvez l'icône Google Play sur votre appareil Android

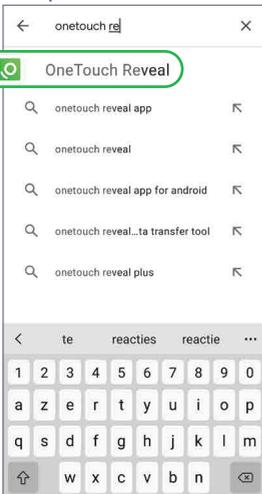B 

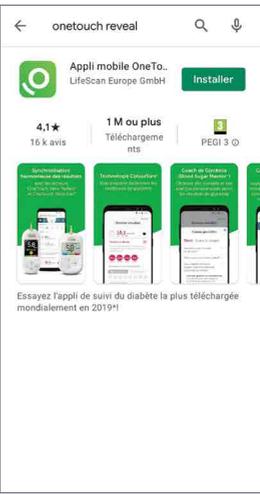C 

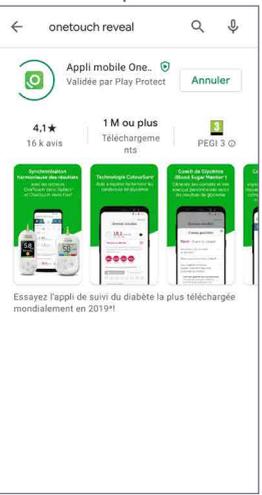D 

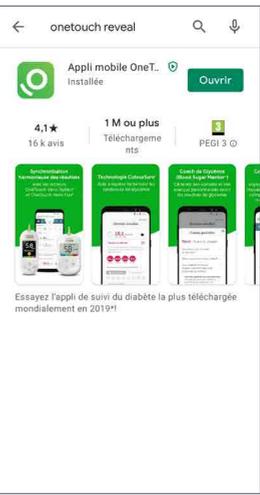E 

Etape 2 : Créer un compte OneTouch Reveal®

A

Suivant

ONETOUCH Reveal®

Sélectionner un pays

Où habitez-vous ?

Belgique

Algeria

Argentina

Brasil

Canada

Chile

Columbia

Česká republika

Deutschland

España

France

Autorisez-vous « OneTouch » à vous envoyer des notifications ?

Les notifications peuvent inclure des alertes, des sons et des pastilles d'icônes. Vous pouvez les configurer dans Réglages.

Refuser Autoriser

Afin de profiter au maximum des avantages que l'appli OneTouch Reveal® a à offrir, sélectionnez "Autoriser". L'appli vous enverra des notifications.

B

Suivant

ONETOUCH Reveal®

Sélectionner un pays

Où habitez-vous ?

Belgique

Algeria

Argentina

Brasil

Canada

Chile

Columbia

Česká republika

Deutschland

España

France

C

Précédent

J'accepte

Consentement au traitement des données personnelles/sensibles

Les informations que vous nous fournissez comme vos coordonnées, vos données médicales relatives à la gestion du diabète ainsi que vos choix concernant le partage de vos données médicales seront utilisées par LifeScan, Inc., nos filiales et nos prestataires de service aux fins de votre enrégistrement et participation à l'Application OneTouch Reveal®.

Nous pourrions transférer les informations à ces fins à notre filiale et à nos prestataires de services dans d'autres pays, y compris les États-Unis, où les lois concernant la protection des données peuvent être différentes de celles de votre pays de résidence. Notre [Politique de protection de la vie privée](#) régit également l'utilisation des informations que vous fournissez.

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, sans déclarer de motif, en consultant les Réglages dans l'Application ou en utilisant les coordonnées fournies dans la section « Nous contacter » de notre [Politique de protection de la vie privée](#).

En cochant la case et en sélectionnant le bouton « J'accepte », vous confirmez que vous avez lu, compris et accepté ces conditions et vous donnez votre consentement explicite au traitement de vos données aux fins définies.

D

ONETOUCH Reveal®

Vous avez déjà un compte ? Connexion

Date de naissance

Adresse e-mail

Confirmer l'adresse e-mail

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

Code d'établ. de santé

Maintenir la connexion

En créant un compte, je confirme avoir lu, compris et accepté les [Conditions d'utilisation](#) et la [Politique de protection de la vie privée](#).

Je souhaiterais recevoir par e-mail des mises à jour relatives au diabète, des supports marketing et des offres promotionnelles de LifeScan Belgium BVBA.

Code d'établ. de santé (facult.)

Maintenir la connexion

En créant un compte, je confirme avoir lu, compris et accepté les [Conditions d'utilisation](#) et la [Politique de protection de la vie privée](#) et avoir atteint l'âge de 18.

Je souhaiterais recevoir par e-mail des mises à jour relatives au diabète, des supports marketing et des offres promotionnelles de LifeScan Belgium BVBA.

Continuer

Etape 3 : Jumeler le lecteur (Partie 1)



IMPORTANT


Veillez à ce que Bluetooth® est activé sur le lecteur et smartphone



A



B

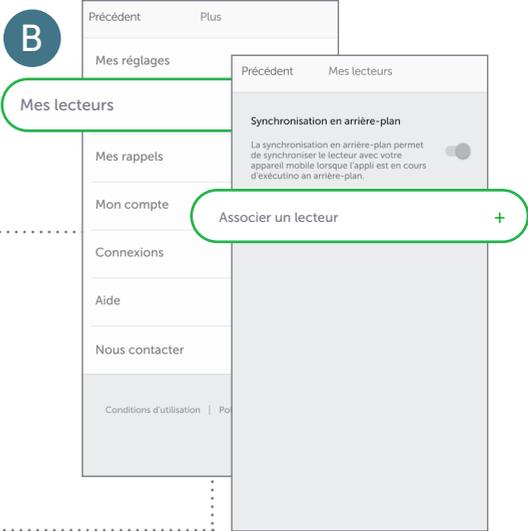


C



D



Etape 3 : Jumeler le lecteur (Partie 2)

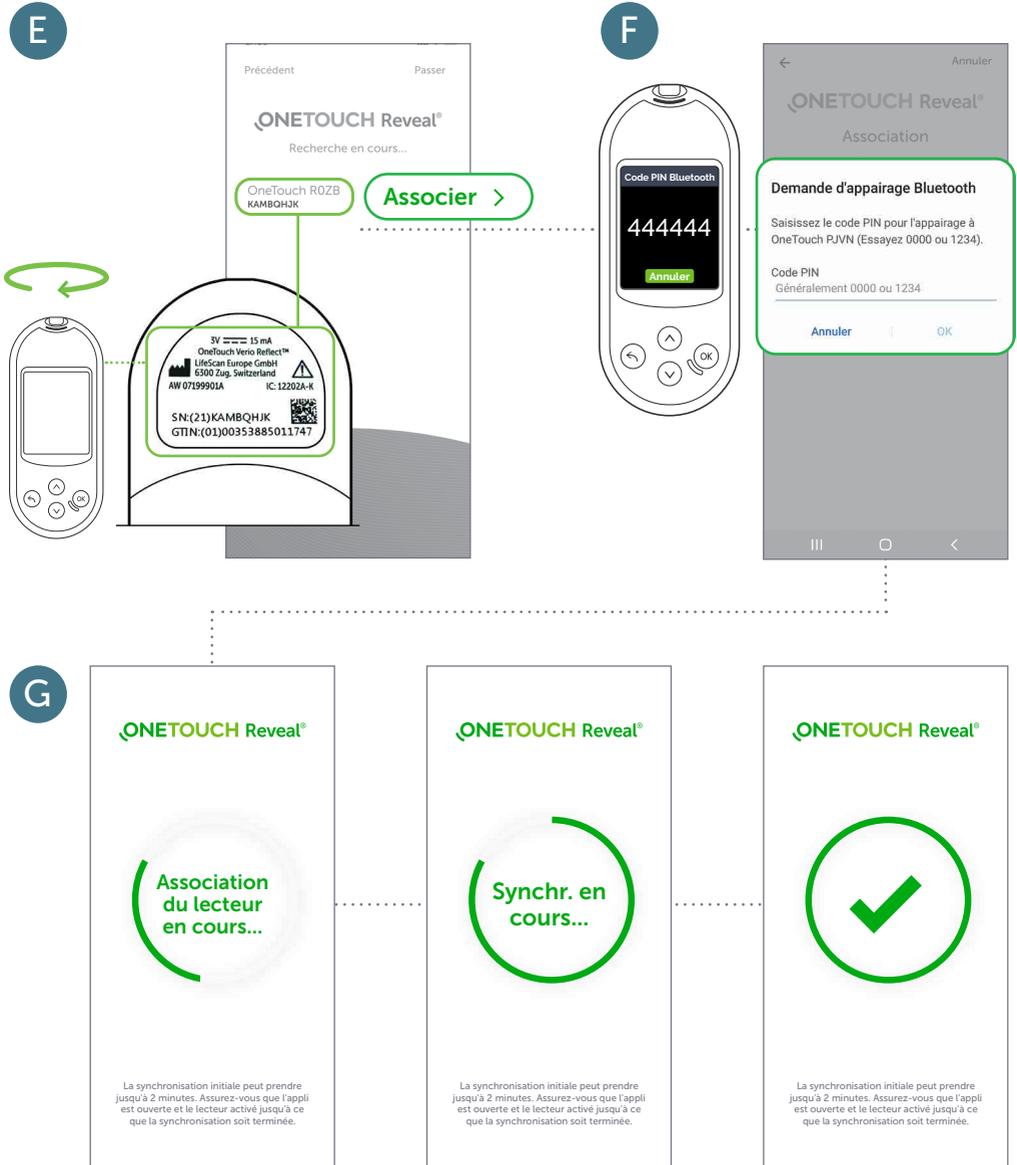


Et vous voilà lancé!

Vous pouvez maintenant commencer à synchroniser.


Etape 4 : Partager votre progrès avec votre professionnel de la santé

Option 1 : Utiliser le code clinique de votre professionnel de la santé

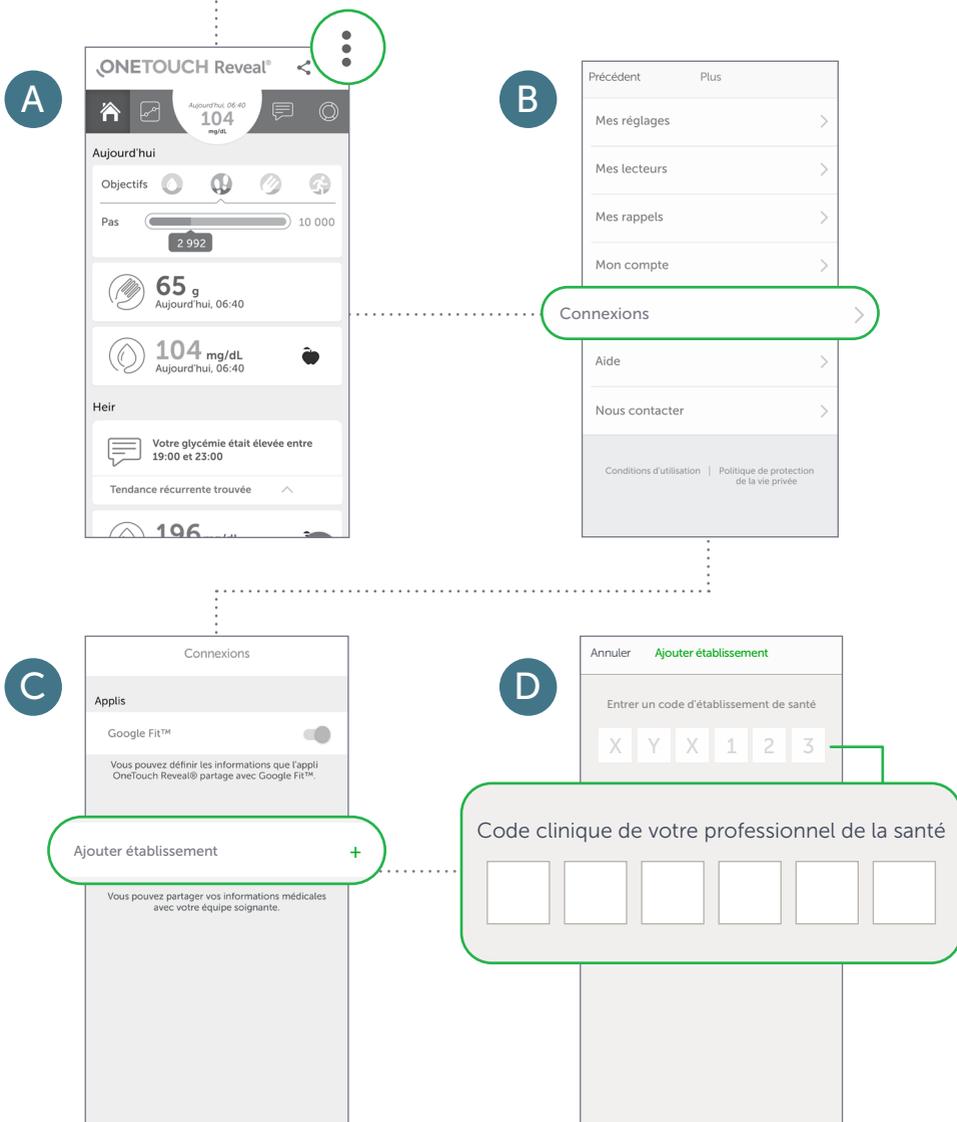

Etape 4 : Partager votre progrès avec votre professionnel de la santé

Option 2 : Partager un rapport PDF par e-mail

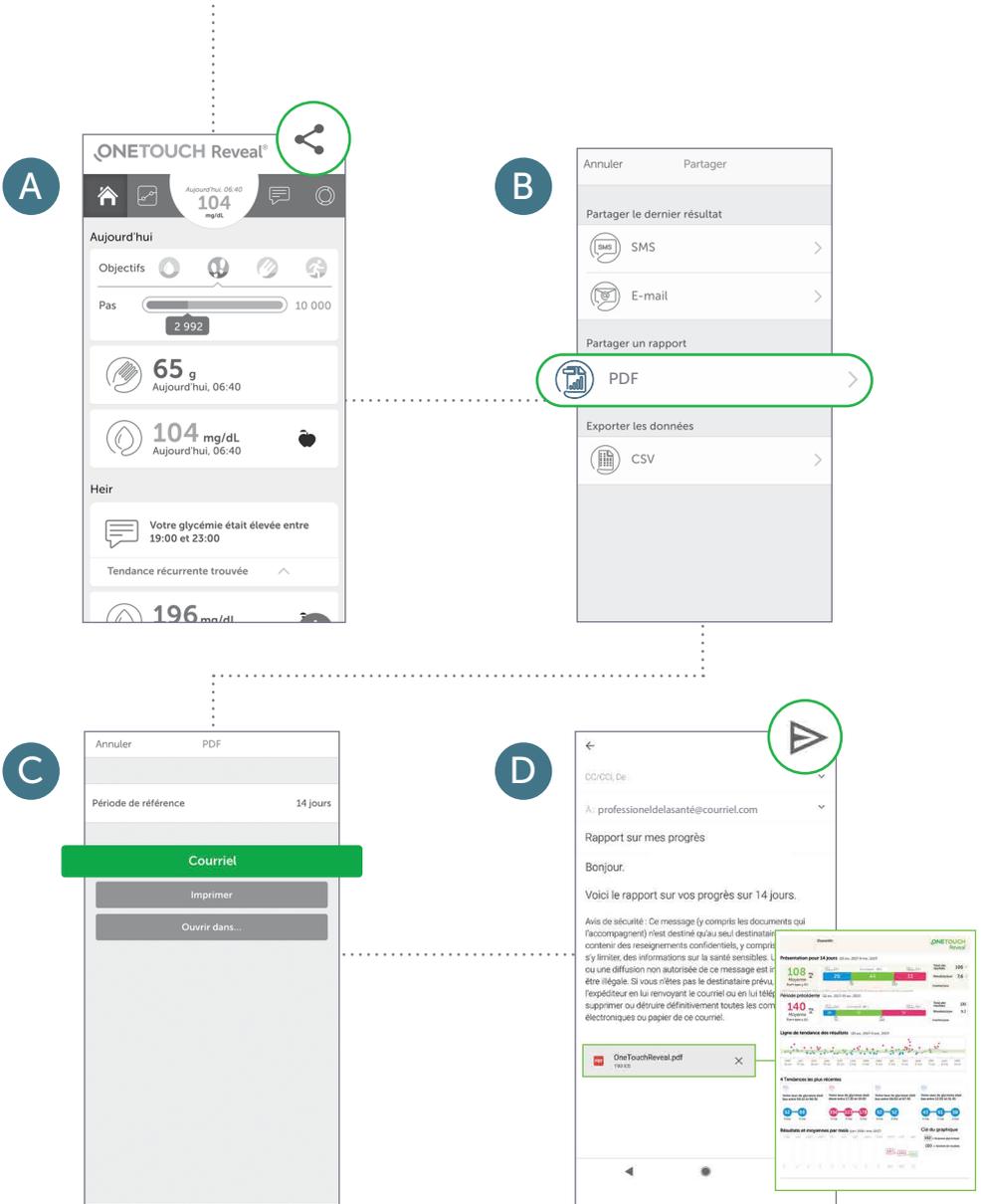

Code clinique de votre professionnel de la santé

--	--	--	--	--	--



Contactez le Service à la
Clientèle OneTouch®
0800 14660 (appel gratuit)



contact@OneTouch.be



www.OneTouch.be
www.OneTouchReveal.be



Regardez les vidéos

La marque et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par LifeScan Scotland est réalisée sous licence.

Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. Les autres marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2020 LifeScan Belgium BV, BE-DMV-2000013

ONETOUCH®