

Application Internet OneTouch Reveal®
Manuel d'utilisation à l'usage des
professionnels de santé Instructions
d'utilisation

Table des matières

Chapitre 1: Présentation

- Présentation du produit
- Utilisation prévue
- Configuration système requise
- Support technique

Chapitre 2: Démarrage

- Démarrage
- Navigation
- Rudiments de l'application Internet OneTouch Reveal®

Chapitre 3: Utilisation de l'application Internet OneTouch Reveal®

- Identification
- Utilisation de l'application Internet OneTouch Reveal®
- Notifications
- Réglages
- Instructions de paramétrage
- Onglet Patients
- Instructions relatives aux tâches de l'onglet Patients
- Onglet Rapports
- Options de l'onglet Rapports
- Onglet Gérer l'établissement
- Instructions relatives aux tâches de l'onglet Gérer l'établissement
- Onglet Utilisateurs de l'établissement
- Instructions relatives aux tâches de l'onglet Utilisateurs de l'établissement

Chapitre 4: Détails des rapports

- Aperçu des détails des rapports
- Couleurs et symboles utilisés dans les rapports
- Messages liés aux tendances
- Notes de bas de page dans les rapports
- Profil de glycémie ambulatoire (AGP)
- Rapport AGP BGM
- Résumé des données du patient BGM
- Rapport d'avancement et carnet
- Rapport Analyse de l'excursion
- Rapport Analyse de l'observance
- Rapport Aperçu de la journée
- Rapport Carnet
- Rapport Liste de données
- Rapport Synthèse par jour de la semaine
- Rapport Synthèse par heure de la journée

Chapitre 5: Transfert de données

- Transfert de données
- Installer le logiciel de transfert de données OneTouch Reveal®
- Transférer les données d'un dispositif à l'aide du logiciel de transfert de données
- Menu du logiciel de transfert de données
- Effacer le dispositif à l'aide du logiciel de transfert de données
- Personnaliser les réglages du logiciel de transfert de données
- Affecter le dispositif d'un patient

Créer un rapport d'invité sans affecter le dispositif d'un patient
Désinstaller le logiciel de transfert de données OneTouch Reveal®

Chapitre 6: Ressources

Ressources

Glossaire

Dispositifs pris en charge

Hierarchie des préférences

Dépannage

À propos de

Chapitre

1

Présentation

Présentation du produit

OneTouch Reveal[®] est une application de gestion du diabète sur Internet. Elle est conçue pour aider les professionnels de santé et les personnes diabétiques à surveiller leur glycémie et leurs doses d'insuline. L'application Internet OneTouch Reveal[®] comprend des rapports imprimables, des messages liés aux tendances et la capacité d'afficher et de transférer des données à distance afin de faciliter la gestion de la glycémie. L'application Internet OneTouch Reveal[®] est compatible avec plusieurs dispositifs.

Voici certains exemples de rapports :

- Résumé des données BGM du patient: aperçu des tendances glycémiques et des excursions, des tests et des dosages, ainsi que des principales statistiques comparatives pour les dates sélectionnées.
- Analyse de l'excursion : liste de toutes les tendances glycémiques et d'insuline sur une période sélectionnée.
- Rapport journalier : aperçu par heure de la journée, des mesures glycémiques, de l'apport en glucides et des données de dose d'insuline.
- Carnet : liste des résultats glycémiques et des données relatives aux glucides et à l'insuline affichés dans des colonnes par heure de la journée.

Voir [Aperçu des détails des rapports](#) pour de plus amples informations.

Les messages liés aux tendances apparaissent dans certains rapports. Ces messages peuvent inclure des détails sur :

- La glycémie et les doses d'insuline ;
- Les événements hypoglycémiques et hyperglycémiques sur une période spécifique, par période de repas, par heure de la journée et par jour de la semaine ;
- La variabilité des résultats glycémiques, notamment les instances dans lesquelles des événements hypoglycémiques et hyperglycémiques se suivent immédiatement.

Voir [Messages liés aux tendances](#) pour de plus amples informations.

Transférez des données et accédez à ces données à distance :

- Les patients peuvent transférer leurs données depuis leur domicile et vous pouvez les consulter dans votre établissement.
- Les patients peuvent imprimer les rapports à leur domicile et les amener à leur rendez-vous.

Vous pouvez télécharger un exemplaire de ce fichier d'aide en cliquant sur **Aide** en haut à droite de votre écran, en cliquant sur **OneTouch Reveal[®] Manuel d'utilisation** et en ouvrant ou en téléchargeant une version au format PDF. Vous aurez besoin d'Adobe[®] Acrobat[®] Reader[®] ou d'une autre application PDF pour lire le fichier d'aide.

- Rendez-vous sur notre site Internet ou contactez notre contact clientèle pour télécharger ou demander à recevoir un exemplaire imprimé.
- Nous vous invitons à nous contacter pour obtenir une assistance technique aux coordonnées suivantes :
0800 14660 (BE) ou 800 25749 (LU) (Lignes en service du lundi au vendredi, de 8h à 17h)

contact@onetouch.be

OneTouch.be/fr/OneTouchReveal

Utilisation prévue

L'application Internet OneTouch Reveal® est destinée à être utilisée par des personnes ayant du diabète ou des professionnels de santé, à domicile ou dans des établissements de soins, afin de visualiser des données depuis les dispositifs de surveillance à domicile, tels que les lecteurs de glycémie, à une base de données de serveur – et pour enregistrer, visualiser, suivre et déterminer les tendances des données relatives à la glycémie, la quantité de glucides et l'activité afin de faciliter la gestion du diabète.

L'application Internet OneTouch Reveal® peut également être utilisée par des médecins ou des professionnels de santé pour activer la fonction Insulin Mentor™ de l'application mobile OneTouch Reveal®.



AVERTISSEMENT : Les rapports sont destinés à aider les patients à suivre et à déterminer les tendances relatives à la gestion du diabète. Veuillez partager ces rapports avec votre professionnel de santé avant de modifier votre régime de diabète.

Configuration système requise

Pour accéder à la liste des dispositifs pris en charge et des configurations matérielle et logicielle requises pour pouvoir utiliser l'application Internet OneTouch Reveal®, cliquez sur le lien suivant :

[OneTouchReveal.be/support/fr_BE/](https://onetouch.be/support/fr_BE/)

L'utilisation continue d'un lecteur ou d'un navigateur non pris en charge signifie que les risques de cybersécurité des utilisateurs finaux peuvent augmenter au fil du temps. Gardez l'application Internet OneTouch Reveal® à jour avec la dernière version, car les mises à jour critiques et les correctifs de sécurité sont souvent distribués au moyen de ces mises à jour. Bien que l'application Internet OneTouch Reveal® utilise des protocoles d'authentification et de cryptage de bout en bout pour sécuriser vos informations, les utilisateurs et les professionnels de santé ne doivent pas utiliser d'appareils ou de navigateurs non pris en charge pour accéder à l'application Internet.

REMARQUE : Les navigateurs ou les logiciels non pris en charge risquent de ne pas fonctionner correctement avec l'application Internet OneTouch Reveal® et peuvent entraîner des risques de cybersécurité accrus. Assurez-vous que vous utilisez la dernière version prise en charge du navigateur.

Support technique

Pour toute question relative à l'utilisation de l'application Internet OneTouch Reveal®, contactez le service client à l'adresse contact@onetouch.be ou au numéro 0800 14660 (BE) ou 800 25749 (LU) (Lignes en service du lundi au vendredi, de 8h à 17h).

Chapitre

2

Démarrage

Démarrage

L'application Internet OneTouch Reveal® offre des fonctionnalités telles que l'impression des rapports, la gestion de l'établissement et le transfert à distance des données du dispositif du patient. L'application vous permet de configurer et de personnaliser votre compte.

Les rapports OneTouch Reveal® sont créés de façon dynamique. Cela signifie que les données, les statistiques, les calculs et les messages liés aux tendances qui apparaissent dans les rapports sont basés sur les sélections, les préférences, et les données du dispositif qui sont enregistrées dans l'application Internet OneTouch Reveal® lorsque vous générez le rapport. Au fur et à mesure que vous effectuez des modifications dans l'application Internet OneTouch Reveal® (par exemple, si vous modifiez les plages d'objectifs, ajoutez ou supprimez un dispositif, transférez des données supplémentaires, etc.), le contenu affiché dans les rapports, notamment les calculs et les messages liés aux tendances, change également.

Pour démarrer, vous avez besoin d'un compte pour utiliser cette application. Si vous ne disposez pas d'un compte, veuillez appeler le 0800 14660 (BE) ou 800 25749 (LU) ou consulter le site [OneTouchReveal.be/register](https://www.onetouchreveal.be/register) pour de plus amples informations.

Navigation

L'application Internet OneTouch Reveal® fournit des onglets, des liens et des icônes pour vous aider à passer d'un écran à l'autre et à effectuer des sélections.

Tableau 1. Icônes de navigation de l'application Internet OneTouch Reveal®

Sélectionnez	Pour
	Avancer ou reculer
	Trier dans l'ordre croissant ou décroissant
	Afficher le profil d'un patient
	Afficher le rapport sur les données BGM du patient
	Accéder au sélecteur de dates du calendrier
	Accéder aux demandes du patient en attente et aux dispositifs à affecter

Tableau 2. Icônes de l'application Internet OneTouch Reveal®

Lorsque vous voyez cette icône	Elle signifie ce qui suit :
	L'icône du logiciel de transfert de données
	Des informations supplémentaires sont fournies
	Un avertissement ou une mise en garde

Tableau 3. Autres icônes

Lorsque vous voyez cette icône	Elle signifie ce qui suit :
	Fabricant

Rudiments de l'application Internet OneTouch Reveal®

L'application Internet OneTouch Reveal® classe les utilisateurs dans l'un des trois rôles suivants : patient, utilisateur de l'établissement ou administrateur de l'établissement. Les rôles d'utilisateur et d'administrateur de l'établissement sont destinés uniquement aux professionnels de santé qui traitent des patients atteints de diabète. Un utilisateur de l'établissement désigné comme administrateur de l'établissement dispose de capacités supplémentaires qui, sinon, ne sont pas accessibles à un utilisateur de l'établissement. Voir [Tableau récapitulatif des rôles et des droits administratifs](#).

REMARQUE : Un compte doit être associé à au moins un administrateur de l'établissement en permanence.

Les informations figurant dans l'application Internet OneTouch Reveal® sont regroupées en quatre onglets : **Patients**, **Rapports**, **Gérer l'établissement** et **Utilisateurs de l'établissement**. Tous les utilisateurs de l'établissement peuvent voir les onglets **Patients** et **Rapports** et y accéder, mais seul un utilisateur de l'établissement désigné comme administrateur de l'établissement peut utiliser les onglets **Gérer l'établissement** et **Utilisateurs de l'établissement**. Voir [Utilisation de l'application Internet OneTouch Reveal](#) pour de plus amples informations sur chaque onglet.

Tableau 1. Tableau récapitulatif des rôles et des droits administratifs

Tâche	Patient	Utilisateur de l'établissement	Administrateur de l'établissement
Créer un compte pour soi-même	✓		✓
Créer un compte pour l'établissement de santé			✓
Créer un compte pour un patient		✓	✓
Supprimer un patient de l'établissement			✓
Transférer les données du dispositif	✓	✓	✓
Afficher, imprimer et enregistrer ses propres rapports	✓		
Afficher, imprimer et enregistrer les rapports des patients		✓	✓
Ajouter (ou supprimer) des utilisateurs de l'établissement			✓
Régler ses propres préférences	✓	✓	✓
Régler les préférences des utilisateurs de l'établissement			✓
Régler les préférences de l'établissement			✓

Chapitre

3

Utilisation de l'application Internet OneTouch Reveal®

Identification

1. À l'aide de votre navigateur Internet, accédez à OneTouchReveal.be.
2. Entrez votre **Nom d'utilisateur** ou **adresse électronique** et **Mot de passe**.
3. Cliquez sur **Identification**.

REMARQUE : Pour garantir la sécurité de vos informations, **ne partagez pas** votre mot de passe avec d'autres personnes et changez de mot de passe tous les 90 jours.

REMARQUE : Gardez l'application Internet OneTouch Reveal® à jour avec la dernière version, car les mises à jour critiques et les correctifs de sécurité sont souvent distribués au moyen de ces mises à jour. Bien que l'application Internet OneTouch Reveal® utilise des protocoles d'authentification et de cryptage de bout en bout pour sécuriser vos informations, les utilisateurs et les professionnels de santé ne doivent pas utiliser d'appareils ou de navigateurs non pris en charge pour accéder à l'application Internet.

Utilisation de l'application Internet OneTouch Reveal®

Lorsque vous vous identifiez pour la première fois auprès de l'application Internet OneTouch Reveal®, un certain nombre d'onglets s'affiche. Vous pouvez cliquer sur un onglet pour accéder aux tâches qu'il contient. Tous les onglets ne sont pas accessibles à tous les utilisateurs. Seuls les administrateurs de l'établissement voient les onglets **Gérer l'établissement et Utilisateurs de l'établissement** lorsqu'ils s'identifient, car ils sont les seuls à pouvoir effectuer les tâches figurant dans ces onglets.

Cette section du manuel d'utilisation décrit les diverses tâches que vous pouvez effectuer dans chaque onglet de l'application Internet OneTouch Reveal®. Vous pouvez découvrir toutes les tâches des onglets **Patients, Rapports, Gérer l'établissement et Utilisateurs de l'établissement**. Chacun de ces onglets commence par un aperçu de l'onglet et de ses tâches. Des instructions sont ensuite fournies afin de réaliser chacune des tâches.

Vous trouverez en outre des instructions relatives aux choix figurant dans le lien **Réglages** qui se trouve dans l'angle supérieur droit de chaque écran.

REMARQUE : Lorsque le terme glucose est utilisé dans ce manuel, il s'agit de la glycémie ou des données de la surveillance continue du glucose (MCG).

Notifications

L'application Internet OneTouch Reveal® fournit des notifications pour les demandes de patients et les dispositifs à attribuer, qu'ils soient nouveaux ou en attente.

Les nouvelles notifications sont indiquées par un chiffre au-dessus de l'icône  dans le coin supérieur droit de votre écran. Cliquez pour développer le menu de notification. Cliquez ensuite sur n'importe quelle notification dans le menu pour lancer l'action.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les actions en attente dans le menu Notifications, voir [Créer un rapport d'invité sans affecter le dispositif d'un patient](#), [Lier le compte d'un patient existant à l'aide du code établissement](#), et [Affecter le dispositif d'un patient](#).

Réglages

Le lien **Réglages** vous permet de définir l’affichage de votre rapport favori et ses options. Il vous permet également de configurer vos informations générales.

Tâches contenues dans le lien Réglages

Profil

Ajoutez ou modifiez vos informations personnelles, notamment :

Modifier vos informations générales

Vous pouvez modifier les informations personnelles vous concernant et votre spécialité. Voir [Modifier vos informations générales](#).

Modifier vos coordonnées

Vous pouvez modifier votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique. Voir [Modifier vos coordonnées](#).

Modifier votre mot de passe

Vous pouvez changer votre mot de passe OneTouch Reveal®. Voir [Changer votre mot de passe](#).

Modifier votre adresse e-mail

Vous pouvez changer votre adresse électronique. Voir [Changer votre adresse électronique](#).

Modifier votre langue

Vous pouvez choisir la langue utilisée par l'application Internet OneTouch Reveal® dans une liste de langues prises en charge dans votre pays. Voir [Modifier votre langue](#).

Rapports du lecteur et Rapports de la pompe

Modifier vos préférences en matière de rapports sur les lecteurs et les pompes

Pour plus d’informations sur la modification de vos préférences de rapports, voir [Modifier vos préférences pour les rapports du lecteur ou de la pompe](#).

- Choisir votre rapport par défaut
Votre rapport par défaut est le premier rapport affiché lors de la consultation des rapports de chacun de vos patients.
- Régler une période par défaut pour les rapports
La période par défaut vous permet de sélectionner 14, 30 ou 90 jours ou une plage personnalisée. Cette plage par défaut s'applique aux données présentées dans les rapports compatibles avec votre sélection.
- Choisir les rapports à imprimer par lot
Cochez autant de rapports que vous le voulez pour l'impression par lots et seuls ces rapports seront imprimés.

L'application vous permet de régler les préférences des rapports séparément pour les lecteurs et les pompes. Par exemple, vous pouvez choisir le rapport Résumé des données du patient comme rapport favori pour les rapports du lecteur et le rapport Aperçu de la journée comme rapport favori pour les patients utilisant des pompes. Vous pouvez également estimer que certains rapports sont particulièrement importants pour les patients qui utilisent des pompes et vouloir les inclure dans l'impression par lot des rapports de pompe uniquement.

Options du rapport

Modifier les options de votre rapport

La création de graphiques et l’affichage de statistiques font partie des options de rapport pour les rapports sur les lecteurs et les pompes. Pour plus d’informations, voir [Modifier les options de vos rapports](#).

Pour plus d’informations sur le fonctionnement des préférences en matière de plages d’objectifs pour les taux de glucose et de rapports, voir la section [Hiérarchie des préférences](#).

Instructions de paramétrage

Les instructions suivantes s'appliquent aux onglets **Profil**, **Rapports du lecteur**, **Rapports de la pompe** et **Options du rapport** dans **Réglages**.

Profil

Cliquer sur **Profil** pour modifier les informations de votre compte.

Modifier vos informations générales

Modifiez le nom et les autres informations du compte ici. Veuillez noter que certaines données sont obligatoires.

1. Cliquez sur **Réglages**.
2. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Informations générales**.
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier vos coordonnées

Modifiez l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique.

1. Cliquez sur **Réglages**.
2. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Coordonnées**.
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Changer votre mot de passe

Les mots de passe doivent comporter de 8 à 16 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.

1. Cliquez sur **Réglages**.
2. Cliquez sur **Changer le mot de passe** à droite de **Nom d'utilisateur/Mot de passe**.
3. Entrez votre mot de passe actuel.
4. Entrez puis confirmez votre nouveau mot de passe.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Changer votre adresse électronique

Vous pouvez changer l'adresse électronique fournie lors de la création de votre compte OneTouch Reveal[®], mais n'oubliez pas que :

- Votre adresse électronique peut être identique à votre **Nom d'utilisateur**.
- Le **Nom d'utilisateur** créé dans le cadre de votre compte OneTouch Reveal[®] ne peut pas être modifié.
- Une adresse électronique doit être associée à votre compte OneTouch Reveal[®].

1. Cliquez sur **Réglages**.
2. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Adresse e-mail**.
3. Entrez votre nouvelle adresse électronique.
4. Entrez votre mot de passe pour confirmer le changement d'adresse électronique.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier votre langue

REMARQUE : Vous pouvez uniquement sélectionner les langues compatibles avec l'application Internet OneTouch Reveal[®] dans votre pays.

1. Cliquez sur **Réglages**.
2. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Langue**.

3. Cliquez sur le menu déroulant **Langue** et sélectionnez une langue.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier vos préférences pour les rapports du lecteur ou de la pompe

Modifiez les préférences d’affichage et d’impression des rapports. L’application Internet vous permet de régler les préférences séparément pour les rapports des lecteurs et des pompes. Voir [Réglages](#) pour de plus amples informations sur les préférences des rapports qui peuvent être réglées.

1. Cliquez sur **Réglages**.
2. Modifier les préférences des rapports.

Pour	Procédez ainsi
Modifier les rapports du lecteur	Cliquez sur Rapports du lecteur et suivez les étapes ci-dessous.
Modifier les rapports de la pompe	Cliquez sur Rapports de la pompe et suivez les étapes ci-dessous.

3. Cliquez sur **Modifier** à l'extrême droite.
4. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Pour	Procédez ainsi
Sélectionner un rapport par défaut	Dans la liste déroulante, sélectionnez le rapport que vous voulez voir à l'écran lorsque vous affichez les rapports d'un patient.
Sélectionner une période par défaut	Dans la liste déroulante, sélectionnez le nombre de jours (14, 30 ou 90, ou une plage personnalisée) que vous voulez inclure dans chaque rapport.
Sélectionner des rapports pour l'impression par lots	Cochez la case en regard de chaque rapport que vous voulez imprimer lorsque vous choisissez l'option d'impression par lots (plusieurs rapports). Les rapports sont énumérés sous leur fonction principale (Résumer, Analyser ou Inspecter).

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier les options de vos rapports

Vous pouvez personnaliser la présentation des données dans les rapports. Vous trouverez une liste des options et leur description en suivant le lien **Options du rapport**.

1. Cliquez sur **Réglages**.
2. Cliquez sur **Options du rapport**.
3. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Options du rapport**.
4. Cochez la case en regard de chaque option voulue.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Onglet Patients

L’onglet **Patients** vous permet de créer et de lier le compte OneTouch Reveal® d’un patient à l’établissement, de régler des plages d’objectifs pour un patient en particulier et de gérer des dispositifs ou d’autres informations générales pour un patient. Vous pouvez également afficher des rapports ou imprimer des rapports par lots depuis cet onglet.

Tâches contenues dans l'onglet Patients

Retrouver un patient

Vous pouvez rechercher un patient dont le compte OneTouch Reveal® est déjà lié à votre établissement. Voir [Rechercher un patient](#). Vous pouvez filtrer les patients selon différentes catégories, rechercher un patient, faire défiler la liste de patients et la trier.

Tâches patient contenues dans l'onglet Patients

Les tâches suivantes vous imposent de rechercher d'abord un patient, puis de cliquer sur le nom de ce patient dans la colonne **Patient**. L'onglet **Profil** du patient se chargera.

Modifier les informations générales d'un patient

Vous pouvez modifier leur nom, leur date de naissance et d'autres informations personnelles. Voir [Modifier les informations générales d'un patient](#). Une fois qu'un patient a terminé l'inscription de son compte, vous pourrez uniquement modifier son numéro d'identifiant.

Modifier les coordonnées d'un patient

Vous pouvez modifier son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique. Voir [Modifier les coordonnées du patient](#). Une fois l'inscription du compte d'un patient terminée, vous ne pourrez plus modifier ses coordonnées.

Modifier les objectifs pour les taux de glucose d'un patient

Vous pouvez modifier le type de diabète et les plages d'objectifs glycémiques pour un patient spécifique. Voir [Modifier les objectifs de glycémie du patient](#). Pour plus d'informations sur ces réglages, voir la section [Hiérarchie des préférences](#).

Activer la fonctionnalité Insulin Mentor™ pour votre patient

Pour configurer la fonctionnalité Insulin Mentor™ pour un patient, voir la section [Activation de la fonction Insulin Mentor de votre patient](#).

Activer la fonctionnalité Insulin Mentor™ pour l'appareil mobile de votre patient

Pour configurer la fonctionnalité Insulin Mentor™ pour l'appareil mobile d'un patient, voir la section [Activation de la fonction Insulin Mentor sur l'appareil mobile du patient](#).

Modifier la langue d'un patient

Vous pouvez choisir la langue utilisée par l'application Internet OneTouch Reveal® dans une liste de langues prises en charge dans votre pays. Voir [Modifier la langue d'un patient](#). Une fois l'inscription du compte d'un patient terminée, vous ne pourrez plus modifier la langue.

Modifier le calendrier des créneaux horaires pour le patient

Certains patients peuvent avoir des plages d'objectifs glycémiques différentes à plusieurs moments de la journée ou de la nuit. Vous pouvez choisir ici le nom et l'heure de début de chaque période. Voir [Modifier les Créneaux horaires du patient](#). Une fois l'inscription du compte d'un patient terminée, vous ne pourrez plus effectuer cette tâche.

Supprimer un patient de l'établissement de santé

Vous pouvez supprimer le compte OneTouch Reveal® d'un patient de votre établissement. Voir [Supprimer un patient de l'établissement](#). Cette tâche apparaît uniquement si vous êtes un administrateur de l'établissement.

Tâches du dispositif contenues dans l'onglet Patients

Modifier le nom du dispositif d'un patient

Vous pouvez modifier le nom du dispositif d'un patient. Voir [Modifier le nom du dispositif d'un patient](#). Une fois l'inscription du compte d'un patient terminée, vous ne pourrez plus effectuer cette tâche.

Retirer le dispositif d'un patient

Vous pouvez supprimer les dispositifs actuellement liés au compte OneTouch Reveal® de votre patient. Voir [Supprimer le dispositif du patient](#). Une fois l'inscription du compte d'un patient terminée, vous ne pourrez plus effectuer cette tâche.

Tâches liées à l'icône Rapport contenues dans l'onglet Patients

Vous pouvez afficher le rapport d'un patient depuis cet onglet. Recherchez d'abord le patient, puis cliquez sur l'icône du rapport de ce patient. Votre rapport par défaut pour ce patient sera affiché. Voir [Onglet Rapports](#) pour de plus amples informations ou voir [Afficher les rapports d'un patient](#) pour des instructions complètes sur l'affichage des rapports.

Instructions relatives aux tâches de l'onglet Patients

Créer le compte d'un patient

Vous pouvez créer un nouveau compte OneTouch Reveal[®] pour un patient, ce qui ajoutera ce patient à votre établissement. Les patients peuvent ensuite transférer les données de leurs dispositifs vers leur compte OneTouch Reveal[®] et avoir une copie des rapports pour leur prochain rendez-vous.

1. Dans l'onglet **Patients**, cliquez sur **Ajouter un patient**.
2. Dans Consentement du professionnel de santé à l'avis de non-responsabilité, cliquez sur le lien Formulaire de consentement du patient pour télécharger le formulaire.
3. Lorsque le formulaire de consentement du patient est chargé, faites défiler vers le bas et cliquez sur le lien Imprimer pour charger une version PDF imprimable du formulaire.
4. Imprimez le formulaire de consentement du patient à l'aide de la boîte de dialogue d'impression de votre navigateur, puis remettez-le au patient pour qu'il le remplisse.
5. Cochez la case J'ai lu, compris et accepté l'avis de non-responsabilité ci-dessus.
6. Saisissez le nom du patient dans Ajouter un nouveau patient.

Les informations supplémentaires requises sont signalées par un astérisque rouge :

- **Date de naissance**
- **Type de diabète**
- **Sexe**

7. En plus de ces informations, la page **Ajouter un nouveau patient** contient deux boutons :

- **Adresse e-mail**
- **Adresse postale**

REMARQUE : L'application Internet OneTouch Reveal[®] sélectionnera par défaut l'option **Adresse e-mail**. Si le patient n'a pas d'adresse électronique, le professionnel de santé peut cliquer sur le bouton **Adresse postale**.

8. Après avoir choisi **Adresse e-mail** ou **Adresse postale** et rempli tous les champs obligatoires, cliquez sur **Ajouter un patient**.

La page **Résumé de l'inscription** se chargera, confirmant que le compte a bien été créé et que le patient a été ajouté à l'établissement.

9. Cliquez sur le bouton **Imprimer le résumé de l'inscription** pour imprimer les informations et les identifiants de connexion du patient et remettez-les au patient.
10. Après avoir remis au patient le Résumé de l'inscription, recommandez-lui de terminer son inscription à son domicile.
Si le patient a fourni une adresse électronique, il recevra un e-mail qui le guidera dans ce processus.

Lier le compte d'un patient existant à l'aide du code établissement

1. Cliquez sur l'icône de notification pour accéder à vos actions en attente.
2. Dans la section Demande(s) du patient, une liste des demandes du patient en attente s'affiche.
3. Cliquez sur **Confirmer** pour accepter la demande.
4. Ajoutez un **ID patient** pour aider à identifier ce patient dans vos enregistrements.
5. Cliquez sur **Méd. principal** pour affecter ce patient à un professionnel de santé.
6. Cliquez sur **ENVOYER** pour lier le compte du patient à votre établissement.
7. Cliquez sur **ANNULER** pour refuser la demande.

REMARQUE : Les utilisateurs de l'établissement peuvent trouver leur **Code Établissement** dans **Réglages > Mon établissement**. Les administrateurs de l'établissement peuvent trouver le **Code Établissement** dans l'onglet **Gérer l'établissement**. Les deux types d'utilisateurs peuvent partager le code de l'établissement de santé par e-mail grâce au lien « **Envoyer le code de l'établissement de santé** » situé dans l'en-tête du portail.

Rechercher un patient

1. Cliquez sur **Patients**.

Une liste de noms de patients s'affiche avec un résumé des informations, telles que le nom du patient, sa date de naissance et sa glycémie moyenne.

2. Recherchez le patient.

- Pour rechercher un patient dans la liste, entrez son nom ou son identifiant dans le champ **Rechercher un patient**. Cliquez ensuite sur Envoyer.
- Cliquez sur **Filtres pour les patients** à droite de la case **Rechercher un patient** et cochez les cases pour réduire la liste des patients en fonction de critères tels que Type de diabète, Sexe, Glycémie moy., etc. Ensuite, cliquez sur **Appliquer les filtres**. Cliquez sur **Supprimer tous les filtres** pour désélectionner et réessayez.
- Vous pouvez également faire défiler la liste de noms.

REMARQUE : Pour trier la liste de patients, cliquez sur les en-têtes de colonne.

Une fois le patient trouvé, cliquez sur son nom pour accéder au profil du patient ou sur une icône de rapport pour afficher et imprimer les rapports de ce patient.

- Cliquez sur  pour afficher et imprimer les rapports BGM du patient.

REMARQUE : Si plusieurs lecteurs de glycémie sont associés à un patient, les données des lecteurs sont combinées.

Modifier les informations générales d'un patient

Modifiez le nom, le suffixe, la date de naissance, le sexe et l'identifiant du patient. Veuillez noter que certaines données sont obligatoires.

REMARQUE : Une fois l'inscription du compte d'un patient terminée, vous ne pourrez plus modifier son identifiant.

1. Cliquez sur la section « Patients ». Voir [Rechercher un patient](#).
2. Cliquez sur le nom du patient.
3. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Informations générales**.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier l'identifiant d'un patient

Modifiez le numéro d'identifiant d'un patient.

1. Cliquez sur la section « Patients ». Voir [Rechercher un patient](#).
2. Cliquez sur le nom du patient.
3. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Informations générales**.
4. Modifiez le numéro d'identifiant du patient pour votre cabinet.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier les coordonnées du patient

Modifiez l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique.

REMARQUE : Une fois l'inscription du compte d'un patient terminée, vous ne pourrez plus effectuer cette tâche.

1. Cliquez sur la section « Patients ». Voir [Rechercher un patient](#).
2. Cliquez sur le nom du patient.
3. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Coordonnées**.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier les objectifs de glycémie du patient

L'application Internet OneTouch Reveal® propose des objectifs préétablis (par défaut) classant les résultats de glycémie dans certaines catégories. Ces plages sont utilisées pour déterminer si les résultats de glycémie sont inclus ou non dans l'objectif et

pour vous informer si la glycémie est trop élevée ou trop basse. Les plages dans la plupart des rapports comprennent Avant repas et Après repas, la plage globale et les valeurs spécifiques pour l'hypoglycémie et l'hyperglycémie sévères. La plage cible du rapport d'invité est prédéfinie conformément au programme de gestion du diabète et n'est pas personnalisable. Pour tous les autres rapports, vous pouvez utiliser la plage de valeurs cible par défaut ou choisir d'autres valeurs.

1. Cliquez sur la section « Patients ». Voir [Rechercher un patient](#).
2. Cliquez sur le nom du patient.
3. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Suivi du diabète**.
4. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Pour	Procédez ainsi
Sélectionner un médecin	Sélectionnez un médecin dans la liste déroulante.
Sélectionner un type de diabète	Confirmez le type de diabète et, le cas échéant, choisissez un type différent dans la liste déroulante.
Utiliser les plages par défaut	Si vous voulez utiliser les valeurs par défaut, décochez la case en regard de Régler les plages personnalisées .
Utiliser des plages personnalisées	Si vous voulez utiliser vos propres plages d'objectifs plutôt que les valeurs par défaut, sélectionnez Régler les plages personnalisées . Saisissez les valeurs des limites supérieure et inférieure pour Avant repas et Après repas . Vous pouvez également saisir des valeurs pour une Hypoglycémie sévère et une Hyperglycémie sévère .

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Activation de la fonction Insulin Mentor™ de votre patient

Un professionnel de santé utilisant l'application Internet OneTouch Reveal® peut activer la fonction Insulin Mentor™, recommandée pour les personnes (de 18 ans ou plus) ayant du diabète et devant prendre de l'insuline pour gérer leur diabète. Elle permet de calculer un bolus d'insuline à l'aide de valeurs glycémiques choisies par l'utilisateur ou synchronisées et/ou d'une valeur d'absorption de glucides et en prenant en compte l'insuline active calculée. Avant de commencer, un médecin ou un professionnel de santé doit activer la fonction Insulin Mentor™ et programmer la configuration des paramètres spécifiques au patient comme l'objectif glycémique, le ratio insuline/glucides, la durée d'action de l'insuline et la sensibilité de l'insuline. Pour configurer la fonction Insulin Mentor™ pour un patient, suivez les mesures suivantes.

1. Sélectionnez un patient depuis l'onglet **Patients**.
2. Lorsque le **Profil** du patient est chargé, faites défiler vers le bas jusqu'à **Insulin Mentor™** à droite de l'écran.
3. Cliquez sur **Régler Insulin Mentor™**.
4. Sélectionnez l'**Incrément de dose** que la fonctionnalité Insulin Mentor™ du patient utilisera : choisissez des demi-unités (**0,5 unité**) ou des unités entières (**1 unité**) dans le menu déroulant.

REMARQUE : L'abréviation « u » ou « U » indique les unités d'insuline.

5. Sélectionnez une **Durée d'insuline active** par incrément de 30 minutes entre **2,0** et **6,5** dans le menu déroulant.
6. Choisissez une des valeurs suivantes dans le menu déroulant **Concentration d'insuline** :
 - **Insuline Ordinaire rapide (U100)**
 - **Insuline Analogue rapide (U100)**
 - **Insuline Analogue rapide (U200)**
7. Choisissez une **Limite de dose unique maximale** parmi les unités d'insuline. Il s'agit de la dose bolus maximale que le patient peut s'administrer en une seule fois. La valeur minimale est 1 unité ; la valeur maximale est 150 unités.
8. La **Objectif glycémique** est le niveau de glycémie que vous voulez que le patient atteigne après lui avoir administré une dose bolus d'insuline. Le nombre après +/- représente la variation par rapport à l'objectif pouvant être acceptée. Si

vous configurez l'**Objectif glycémique** du patient sur **120 mg/dL** avec un écart (+/-) de **20 mg/dL**, la fonctionnalité Insulin Mentor™ calculera uniquement une correction de glycémie négative ou positive si le résultat de glycémie du patient est inférieur à 100 mg/dL ou supérieur à 140 mg/dL, respectivement. Vous pouvez paramétrer un seul **Objectif glycémique** et une seule variation pour une période de 24 heures ou vous pouvez cliquer sur l'icône plus (+) et définir jusqu'à 12 périodes de temps différentes avec des **Objectif glycémique** et des variations différents pour des durées différentes tout au long de la journée.

9. Choisissez le **Facteur de correction 1:x mg/dL** que vous souhaitez que le patient utilise. Le rapport minimum que vous pouvez régler **Facteur de correction** est de 1 :1 mg/dL ; le rapport maximal est de 1 :200 mg/dL. Vous pouvez paramétrer un seul **Facteur de correction** pour une période de 24 heures ou vous pouvez cliquer sur l'icône plus (+) et définir jusqu'à 12 périodes de temps différentes avec des facteurs de correction différents pour des durées différentes tout au long de la journée.
10. Définissez le **Ratio insuline/glucides**. Un ratio insuline/glucide de **1:10** indique qu'une unité d'insuline couvrira 10 grammes de glucides. Le **Ratio insuline/glucides** minimal est 1:1 ; le ratio maximal est 1:100. Vous pouvez paramétrer un seul ratio insuline/glucide pour une période de 24 heures ou vous pouvez cliquer sur l'icône plus (+) et définir jusqu'à 12 périodes de temps différentes avec des ratios insuline/glucide différents pour des durées différentes tout au long de la journée.
11. Vous pouvez donner au patient la possibilité de modifier lui-même ces réglages depuis l'application mobile OneTouch Reveal®. À côté de **Permettre au patient de modifier les réglages Insulin Mentor™ dans l'application mobile OneTouch Reveal®** ?, cliquez sur le bouton **Oui** pour donner la permission au patient de changer ses paramètres, ou sur **Non** pour limiter sa capacité à les modifier.
12. Lorsque vous avez configuré tous les champs, cliquez sur **Sauvegarder & Activer**.
13. Une fenêtre contextuelle **Voulez-vous vraiment activer ?** s'affichera en présentant un texte confirmant que le patient a été formé de façon adéquate et dispose des connaissances requises pour compter les glucides et calculer un bolus d'insuline et déterminer lorsqu'il est approprié d'ajuster les réglages du Insulin Mentor™.
14. Cochez la case pour confirmer que le patient a bien les connaissances requises pour utiliser la fonction Insulin Mentor™ et cliquez sur **Activer**.

Vous pouvez revenir au **Profil** du patient afin de **Désactiver Insulin Mentor™** pour le patient ou modifier les **Réglages de Insulin Mentor™** du patient.

Vous pourrez alors voir les doses d'insuline administrées par le patient dans les rapports suivants :

- Carnet
- Liste de données
- Aperçu de la journée
- Synthèse par jour de la semaine
- Synthèse par heure de la journée

Activation de la fonction Insulin Mentor™ sur l'appareil mobile du patient

Les professionnels de santé qui n'utilisent pas l'application Internet OneTouch Reveal® ont également la possibilité d'activer la fonction Insulin Mentor™ pour un patient dans l'application mobile OneTouch Reveal® sur l'appareil mobile du patient en suivant les étapes indiquées ci-après. Veuillez lire également la section « Activation de la fonctionnalité Insulin Mentor™ de votre patient » ci-dessus pour obtenir des informations supplémentaires sur cette fonctionnalité.

Vous avez besoin d'un code d'activation qui vous est fourni par votre représentant OneTouch®. Dans le cadre du paramétrage des réglages de la fonction Insulin Mentor™ du patient, vous pouvez donner au patient la possibilité de modifier ses propres paramètres. Vous avez également besoin du code d'activation si vous ne donnez pas au patient la possibilité de modifier ses propres paramètres, ou si vous (ou le patient) désactivez la fonction Insulin Mentor™.

Pour paramétrer la fonction Insulin Mentor™ du patient sur son appareil mobile :

1. Lancez l'application mobile OneTouch Reveal®.
2. Depuis le **Calendrier**, appuyez sur le menu **Plus** en haut à droite de l'écran.

3. Appuyez sur **Mes réglages**.
4. Sur l'onglet **Réglages du système** de l'écran **Mes réglages**, faites défiler vers le bas jusqu'à **Insulin Mentor™**.
5. Pour activer la fonction Insulin Mentor™ pour le patient, appuyez sur le bouton curseur.
6. Entrez le code d'activation qui vous a été fourni par votre représentant OneTouch® sur l'écran **Saisie du code**.
7. Cochez la case pour confirmer que le patient a les connaissances requises pour compter les glucides et calculer un bolus d'insuline et pour confirmer que vous avez discuté avec le patient des réglages de la fonction Insulin Mentor™ à effectuer lorsque cela est nécessaire.
8. Appuyez sur **Régler**.
9. Définissez le **Ratio insuline/glucides**. Un ratio insuline/glucide de **1:10** indique qu'une unité d'insuline couvrira 10 grammes de glucides. Le **Ratio insuline/glucides** minimal est 1:1 ; le ratio maximal est 1:100. Vous pouvez paramétrer un seul ratio insuline/glucide pour une période de 24 heures ou vous pouvez cliquer sur l'icône plus (+) et définir jusqu'à 12 périodes de temps différentes avec des ratios insuline/glucide différents pour des durées différentes tout au long de la journée.
10. Choisissez le **Facteur de correction 1:x mg/dL** que vous souhaitez que le patient utilise. Le rapport minimum que vous pouvez régler **Facteur de correction** est de 1 : 1 mg/dL ; le rapport maximal est de 1 : 200 mg/dL. Vous pouvez paramétrer un seul **Facteur de correction** pour une période de 24 heures ou vous pouvez cliquer sur l'icône plus (+) et définir jusqu'à 12 périodes de temps différentes avec des facteurs de correction différents pour des durées différentes tout au long de la journée.
11. La **Glycémie cible** est le niveau de glycémie que vous voulez que le patient atteigne après lui avoir administré une dose bolus d'insuline. Si vous configurez l'**Glycémie cible** du patient sur **120 mg/dL** avec un écart (+/-) de **20 mg/dL**, la fonctionnalité Insulin Mentor™ calculera uniquement une correction de glycémie négative ou positive si le résultat de glycémie du patient est inférieur à 100 mg/dL ou supérieur à 140 mg/dL, respectivement. Vous pouvez paramétrer un seul **Glycémie cible** et une seule variation pour une période de 24 heures ou vous pouvez cliquer sur l'icône plus (+) et définir jusqu'à 12 périodes de temps différentes avec des **Glycémie cible** et des variations différents pour des durées différentes tout au long de la journée.
12. Choisissez une **Durée d'insuline active** en appuyant sur **heures** et en sélectionnant une valeur dans le menu. Plage d'options entre **2,0** heures et **6,5** heures par incréments de 30 minutes.
13. Choisissez une **Limite de dose unique maximale** en appuyant sur **unités (u)**. Il s'agit de la dose bolus maximale que le patient peut s'administrer en une seule fois. La valeur minimale est 1 unité ; la valeur maximale est 150 unités.
14. Sélectionnez un **Incrément de dose** en appuyant sur **unités (u)** pour choisir un **Incrément de dose** que la fonctionnalité Insulin Mentor™ du patient utilisera : choisissez des demi-unités (**0,5**) ou des unités entières (**1,0**) dans le menu.
15. Choisissez une valeur pour la **Concentration d'insuline** en appuyant sur le champ à côté. Les options sont les suivantes :
 - **Insuline Ordinaire rapide (U100)**
 - **Insuline Analogue rapide (U100)**
 - **Insuline Analogue rapide (U200)**
16. L'activation du bouton curseur **Aut. modifs par patient** permet au patient de modifier les réglages de la fonction Insulin Mentor™. Appuyez sur le bouton curseur et déplacez-le vers la droite pour autoriser un patient à modifier ses propres paramètres.
17. Lorsque vous avez terminé de paramétrer la fonction Insulin Mentor™ du patient, appuyez sur **Activer** en haut à droite de l'écran.

Si vous devez modifier un réglage de la fonction Insulin Mentor™ du patient, vous pouvez alors retourner sur l'onglet **Réglages du système** de l'écran **Mes réglages** et appuyer sur **Insulin Mentor™**.

Modifier la langue d'un patient

1. Cliquez sur la section « Patients ». Voir [Rechercher un patient](#).
2. Cliquez sur le nom du patient.
3. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Langue**.
4. Sélectionnez la langue dans la liste déroulante.

REMARQUE :

- Seules les langues prises en charge pour votre pays sont affichées.
- Une fois l'inscription du compte d'un patient terminée, vous ne pourrez plus effectuer cette tâche.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier les Créneaux horaires du patient

Les réglages d'un patient dans l'application Internet OneTouch Reveal® incluent une fonction **Créneaux horaires** qui a une incidence sur plusieurs rapports, notamment les rapports **Résumé des données du patient BGM**, **Liste de données** et **Synthèse par heure de la journée**. Les **Créneaux horaires** divisent la journée en huit périodes : **Pendant la nuit**, **Av. petit-déj.**, **Ap. petit-déj.**, **Av. déjeuner**, **Ap. déjeuner**, **Avant le dîner**, **Après le dîner** et **Au coucher**.

Les administrateurs et les utilisateurs du compte Établissement de santé peuvent modifier l'heure de début et de fin de chaque tranche horaire dans l'onglet **Profil** des réglages d'un patient dans l'application Internet OneTouch Reveal®. Ils peuvent également modifier eux-mêmes les noms des tranches horaires.

REMARQUE : Une fois l'inscription du compte d'un patient terminée, vous ne pourrez plus effectuer cette tâche.

1. Cliquez sur **Réglages**.
2. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Créneaux horaires**.
3. L'heure de début de sept des huit périodes apparaît sous forme de liens cliquables.
Cliquez sur chaque lien pour modifier l'heure de début.
4. Lorsque vous cliquez sur le lien, un menu déroulant apparaît sous celui-ci.
Vous pouvez choisir les heures de début par incréments de 15 minutes.
5. Lorsque vous modifiez l'heure de début d'une période, l'heure de fin de la période précédente change automatiquement.
6. Vous pouvez modifier les heures de début des autres tranches horaires selon vos heures préférées.
7. Lorsque **Créneaux horaires** est en mode édition, chaque **Nom** correspond à un champ de texte modifiable dans lequel vous pouvez modifier le nom de la période.
8. Lorsque vous avez terminé de mettre à jour les heures de début et les noms des tranches horaires, cliquez sur **Enregistrer**.

Supprimer un patient de l'établissement

Seul un administrateur de l'établissement peut supprimer le compte OneTouch Reveal® d'un patient de l'établissement.

1. Cliquez sur la section « Patients ». Voir [Rechercher un patient](#).
2. Cliquez sur le nom du patient.
3. Cliquez sur **Supprimer** sous **Supprimer un patient de l'établissement**.
4. Cliquez sur **Confirmer**.

Le compte OneTouch Reveal® du patient est supprimé.

Modifier le nom du dispositif d'un patient

REMARQUE : Une fois l'inscription du compte d'un patient terminée, vous ne pourrez plus effectuer cette tâche.

1. Cliquez sur la section « Patients ». Voir [Rechercher un patient](#).
2. Cliquez sur le nom du patient.

3. Cliquez sur **Dispositifs**.

Tous les dispositifs liés au compte OneTouch Reveal® sont affichés.

4. Cliquez sur **Modifier** à droite de chaque dispositif que vous voulez renommer.

5. Entrez le nouveau nom de chaque dispositif.

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer** pour chaque dispositif renommé.

Supprimer le dispositif du patient

Si un dispositif et ses données ne sont plus utilisés, vous pouvez supprimer le dispositif de l'application Internet OneTouch Reveal®.

REMARQUE :

- Une fois l'inscription du compte d'un patient terminée, vous ne pourrez plus effectuer cette tâche.
- Une fois qu'un dispositif est supprimé, toutes les données qu'il contient sont également supprimées et ne peuvent pas être restaurées. La suppression d'un dispositif peut affecter les tendances précédentes et les statistiques.

1. Cliquez sur la section « Patients ». Voir [Rechercher un patient](#).

2. Cliquez sur le nom du patient.

3. Cliquez sur **Dispositifs**.

Tous les dispositifs liés au compte OneTouch Reveal® sont affichés.

4. Cliquez sur **Supprimer ce dispositif** pour supprimer un dispositif et toutes ses données de l'application Internet OneTouch Reveal®.

5. Cliquez sur **Oui, supprimer le dispositif** pour confirmer ou sur **ANNULER** si vous ne voulez pas supprimer le dispositif et ses données.

Onglet Rapports

L'onglet **Rapports** contient des informations sur chaque rapport OneTouch Reveal®. Il vous permet également de déterminer le mode d'affichage, d'impression et d'enregistrement de vos rapports. Pour une description de chacun des rapports suivants OneTouch Reveal® voir [Aperçu des détails des rapports](#) :

- Rapport AGP BGM, voir [Rapport AGP BGM](#).
- Résumé des données BGM du patient, voir [Résumé des données du patient BGM](#).
- Rapport d'avancement et carnet, voir [Rapport d'avancement et carnet](#).
- Analyse de l'excursion, voir [Rapport Analyse de l'excursion](#).
- Analyse de l'observance, voir [Rapport Analyse de l'observance](#).
- Rapport journalier, voir [Rapport Aperçu de la journée](#).
- Carnet, voir [Rapport Carnet](#).
- Liste de données, voir [Rapport Liste de données](#).
- Détails par jour de la semaine, voir [Rapport Synthèse par jour de la semaine](#).
- Détails par heure de la journée, voir [Rapport Synthèse par heure de la journée](#).

Options de l'onglet Rapports

Afficher les rapports d'un patient

Vous pouvez afficher les rapports de n'importe quel patient. Voir [Afficher les rapports d'un patient](#). Le premier rapport affiché pour chaque patient sera votre rapport par défaut, si vous en avez défini un, ou le rapport d'avancement et le carnet.

Afficher un rapport différent

Vous pouvez afficher un rapport différent de celui qui est actuellement affiché dans l'onglet. Voir [Afficher un rapport différent](#).

Modifier la plage de dates d'un rapport

Vous pouvez modifier le nombre de jours de données (14, 30 ou 90 jours ou une plage personnalisée) à inclure dans la plupart des rapports. Voir [Modifier la période pour un rapport](#).

Modifier les options d'un rapport

Vous pouvez modifier les options d'affichage d'un rapport sans avoir à suivre le lien **Options du rapport** dans **Réglages**. Voir [Modifier les options d'un rapport](#).

Modifier l'ordre de tri du carnet

Vous pouvez choisir de trier les données du rapport Carnet par date en ordre croissant ou décroissant. Voir [Modifier l'ordre de tri pour le rapport Carnet](#).

Télécharger un rapport

Vous pouvez télécharger le rapport qui est affiché ou celui que vous avez sélectionné ou tous vos rapports préférés. Voir [Télécharger un rapport](#).

Imprimer et enregistrer les rapports

Vous pouvez imprimer des rapports de plusieurs manières en suivant les instructions de l'application Internet OneTouch Reveal[®] qui se trouvent dans [Imprimer et enregistrer des rapports](#). Chaque option d'impression proposée par l'application Internet OneTouch Reveal[®] génère un rapport en format PDF que vous pouvez imprimer ou enregistrer. Pour lire une description complète de chaque rapport, voir [Aperçu des détails des rapports](#). Cette section donne également des informations sur les tendances qui sont susceptibles d'être générées (voir [Messages liés aux tendances](#)).

Options de l'onglet Rapports

Afficher les rapports d'un patient

Vous pouvez afficher les rapports d'un patient depuis l'onglet **Rapports** ou l'onglet **Patients**. Cette tâche donne des instructions pour les deux options.

1. Choisissez l'une des deux options :

Procédez ainsi	Puis comme suit
Cliquez sur Rapports .	Cliquez sur le nom du patient.
Cliquez sur Patients .	Cliquez sur l'icône de rapport BGM ()

Votre rapport par défaut est affiché.

2. Pour afficher un rapport différent, cliquez sur la liste déroulante en regard du nom du rapport actuel, puis cliquez sur le rapport que vous voulez afficher.
3. Pour modifier la période pour les données incluses dans les rapports qui proposent plusieurs affichages de périodes, cliquez sur l'icône du calendrier () en regard de la période actuelle.

La case **Choisir une période** vous permettant de régler une période prédéfinie ou personnalisée pour les rapports apparaît. Les rapports vous permettent d'afficher 14, 30 ou 90 jours de données ou de régler une plage personnalisée. Si vous sélectionnez une période personnalisée, utilisez le calendrier pour choisir les dates de début et de fin.

REMARQUE : La plage de dates sélectionnée sera appliquée à tous les rapports permettant l'affichage de plusieurs plages de dates.

Afficher un rapport différent

Lors de l'affichage d'un rapport, vous pouvez naviguer vers un autre rapport pour le même patient.

1. Cliquez sur la flèche en regard du nom du rapport affiché.
2. Sélectionnez dans le menu déroulant le rapport que vous voulez afficher.

Le nouveau rapport est affiché.

Modifier la période pour un rapport

Lors de l’affichage d’un rapport qui autorise l’affichage de plusieurs périodes, vous pouvez modifier la plage de dates du rapport. La période correspond au nombre de jours de données (14, 30, 90 jours ou une plage personnalisée) que vous voulez inclure dans chaque rapport.

1. Cliquez sur l’icône du calendrier () en regard de la période actuelle.

La fenêtre contextuelle **Choisir une période** s’ouvre et affiche 3 mois du calendrier, le mois courant au milieu.

Utilisez les boutons fléchés pour inclure les données d’une période de 3 mois différente.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

2. Sélectionnez une plage de 14, 30 ou 90 jours.

- a) Sélectionnez la période (14 jours, 30 jours ou 90 jours).
- b) Dans les cases du calendrier, cliquez sur la date de fin de la plage.

La période sélectionnée apparaît maintenant dans le calendrier sous la forme de cases bleues ombrées.

3. Sélectionnez une plage personnalisée.

- a) Sélectionnez **Personnaliser**.
- b) Dans les cases du calendrier, cliquez sur la date de début et sur la date de fin pour la plage personnalisée (sans excéder 90 jours).

La période sélectionnée apparaît maintenant dans le calendrier sous la forme de cases bleues ombrées.

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Appliquer**.

Modifier les options d'un rapport

Lors de l’affichage d’un rapport, vous pouvez en modifier les options sans avoir à accéder au lien **Options du rapport** dans **Réglages**.

1. Cliquez sur **Options du rapport** dans l’onglet **Rapports**.

Seules les options qui s’appliquent au rapport sélectionné sont affichées. Les cases cochées indiquent les sélections effectuées sur le lien **Options du rapport** dans **Réglages**.

2. Cochez la case de chaque option voulue et décochez la case de chaque option non voulue.
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Appliquer**.

Modifier l'ordre de tri pour le rapport Carnet

Vous pouvez choisir de trier les données du rapport Carnet par date en ordre croissant ou décroissant.

1. Lors de l’affichage du rapport Carnet, cliquez sur **Trier par date**.
2. Dans la liste déroulante, choisissez **Croissant** ou **Décroissant**.

Les données du rapport Carnet seront triées selon votre sélection.

Télécharger un rapport

Vous pouvez télécharger un seul rapport (celui actuellement affiché ou celui sélectionné) ou vous pouvez choisir de télécharger l’ensemble des rapports préférés sélectionnés dans **Réglages**.

Cliquez sur le bouton **Télécharger un rapport**.

Un fichier PDF unique contenant les rapports que vous pouvez afficher, imprimer et enregistrer est créé.

REMARQUE : Les émojis saisis dans les notes par les patients à l’aide de l’appli mobile OneTouch Reveal® peuvent ne pas s’afficher dans les rapports PDF.

Imprimer et enregistrer des rapports

Imprimez ou enregistrez les rapports au format PDF.

Vous pouvez afficher, imprimer et enregistrer les rapports de plusieurs manières. Choisissez parmi les options suivantes dans l'onglet **Patients**.

Pour	Procédez ainsi
Imprimer des rapports préférés pour un seul patient.	• Cliquez sur Patients. • Cliquez sur Télécharger dans File d'attente de téléchargement afin de générer un PDF des rapports.
Imprimer un seul rapport ou les rapports préférés pour un patient.	• Cliquez sur Patients. • Cliquez sur l'icône de rapport BGM (. • Si vous envisagez d'imprimer un seul rapport, choisissez-le dans la liste déroulante. • Cliquez sur Télécharger les rapports. • Cliquez sur Télécharger un seul rapport ou sur tous vos rapports préférés afin d'en télécharger une version PDF.

Vous pouvez maintenant afficher, imprimer ou enregistrer le PDF.

Onglet Gérer l'établissement

L'onglet **Gérer l'établissement** permet à un administrateur de l'établissement de régler des préférences de rapport pour l'établissement.

REMARQUE : Cet onglet s'affiche uniquement pour les utilisateurs désignés comme administrateurs du compte Établissement de santé. Pour désigner un utilisateur comme un administrateur de l'établissement, voir [Modifier le rôle d'administrateur de l'établissement](#).

Pour plus d'informations sur le rôle du chef d'établissement de santé et la définition des préférences de rapport pour l'établissement de santé, voir [Rudiments de l'application Internet OneTouch Reveal](#).

Tâches contenues dans l'onglet Gérer l'établissement

Modifier les informations sur l'établissement de santé

Vous pouvez modifier le nom, le numéro de téléphone et/ou le numéro de fax de l'établissement de santé. Voir [Modifier les informations sur l'établissement](#).

Sélectionner la langue de l'établissement de santé ou l'unité de mesure

Parmi les langues disponibles, vous pouvez choisir celle que l'application Internet OneTouch Reveal® affichera pour votre établissement de santé. Voir [Sélectionner la langue de l'établissement/l'unité de mesure](#).

Dans certains pays, vous aurez la possibilité de choisir l'unité de mesure utilisée pour les résultats glycémiques de l'établissement de santé.

Les tâches suivantes s'appliquent à tous les patients de l'établissement. Une fois réglées, ces tâches deviennent les réglages par défaut pour tous les utilisateurs de l'établissement et tous les administrateurs de l'établissement. Si un utilisateur de l'établissement ou un administrateur de l'établissement veut personnaliser les réglages pour ses patients, il peut le faire. Voir [Réglages](#) pour de plus amples informations. Un administrateur de l'établissement peut également régler ces préférences pour un autre utilisateur d'établissement ou un autre administrateur de l'établissement. Voir [Onglet Utilisateurs de l'établissement](#) pour de plus amples informations. Ses réglages remplaceront alors ceux réglés pour l'établissement dans son ensemble. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des préférences en matière de plages d'objectifs pour les taux de glucose et de rapports, voir la section [Hiérarchie des préférences](#).

Modifier les préférences des rapports de l'établissement de santé

Vous pouvez régler les préférences des rapports pour tous les patients de l'établissement. Voir [Modifier les préférences du rapport de l'établissement](#). Vous pouvez choisir, sous Préférences des rapports, votre rapport par défaut, régler une plage de dates par défaut et choisir les rapports qui seront imprimés lors de l'impression par lots. L'application Internet vous permet de régler les préférences des rapports séparément pour les rapports du lecteur et ceux de la pompe. Par exemple, vous pouvez choisir le rapport Résumé des données du patient comme rapport par défaut pour les rapports du lecteur et le rapport Aperçu de la journée comme rapport par défaut pour les patients utilisant des pompes.

Le rapport par défaut est le premier rapport affiché pour chacun des patients de votre établissement.

La période par défaut vous permet de sélectionner 14, 30 ou 90 jours ou une plage personnalisée. Cette plage par défaut s'applique aux données présentées dans les rapports compatibles avec votre sélection.

Voir [Aperçu des détails des rapports](#) pour de plus amples informations sur chaque rapport.

Modifier les options des rapports de l'établissement de santé

Vous pouvez modifier les options du rapport qui seront appliquées aux rapports du lecteur et de la pompe pour tous les patients de l'établissement. Voir [Modifier les options du rapport de l'établissement](#).

Instructions relatives aux tâches de l'onglet Gérer l'établissement

Les instructions suivantes s'appliquent aux liens **Profil**, **Rapports du lecteur**, **Rapports de la pompe** et **Options du rapport** figurant dans l'onglet **Gérer l'établissement**.

Modifier les informations sur l'établissement

Modifiez le nom, le numéro de téléphone ou le numéro de fax de l'établissement.

1. Cliquez sur **Gérer l'établissement**.
2. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Informations sur l'établissement**.
3. Modifiez les informations sur l'établissement.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Sélectionner la langue de l'établissement/l'unité de mesure

1. Cliquez sur **Gérer l'établissement**.
2. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Langue**.
3. Sélectionnez la langue dans la liste déroulante.

REMARQUE : Seules les langues prises en charge pour votre pays sont affichées.

4. Dans certains pays, vous aurez la possibilité de sélectionner l'unité de mesure qui sera appliquée à tous les résultats glycémiques des patients de votre établissement.
Cliquez sur le bouton correspondant à la bonne unité de mesure ou alors ne modifiez pas ce paramètre.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier les préférences du rapport de l'établissement

Modifiez les préférences d'affichage et d'impression des rapports.

1. Cliquez sur **Gérer l'établissement**.
2. Sélectionnez l'onglet correspondant au type de rapport que vous souhaitez gérer.
3. Cliquez sur **Modifier** à l'extrême droite.
4. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Pour	Procédez ainsi
Sélectionner un rapport par défaut	Dans la liste déroulante, sélectionnez le rapport que vous voulez voir à l'écran lorsque vous affichez les rapports d'un patient.
Sélectionner une période par défaut	Dans la liste déroulante, sélectionnez le nombre de jours (par exemple 14, 30 ou 90 jours) que vous voulez inclure dans chaque rapport.

Pour	Procédez ainsi
Sélectionner des rapports pour l'impression par lots	Cochez la case en regard de chaque rapport que vous voulez imprimer lorsque vous choisissez l'option d'impression par lots (plusieurs rapports). Les rapports BGM sont énumérés sous leur fonction principale (Résumer, Analyser ou Inspecter).

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier les options du rapport de l'établissement

Modifiez les options d'affichage et d'impression des rapports.

1. Cliquez sur **Gérer l'établissement**.
2. Cliquez sur **Options du rapport**.
3. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Options du rapport**.
4. Cochez la case en regard de chaque option voulue.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Onglet Utilisateurs de l'établissement

L'onglet Utilisateurs de l'établissement permet à l'administrateur de l'établissement d'ajouter des utilisateurs ou de modifier les préférences des rapports ou le profil d'un utilisateur de l'établissement.

REMARQUE : Cet onglet s'affiche uniquement pour les utilisateurs désignés comme administrateurs du compte Établissement de santé. Pour désigner un utilisateur comme un administrateur de l'établissement, voir [Modifier le rôle d'administrateur de l'établissement](#).

Pour de plus amples informations sur le rôle de gestionnaire de l'établissement de santé et le réglage des préférences des rapports pour les utilisateurs de l'établissement de santé, voir [Rudiments de l'application Internet OneTouch Reveal](#).

Tâches contenues dans l'onglet Utilisateurs de l'établissement

Pour effectuer la plupart de ces tâches, vous devez d'abord sélectionner un utilisateur de l'établissement.

Ajouter un compte d'utilisateur de l'établissement de santé

Vous pouvez ajouter tout professionnel de santé ayant besoin d'accéder à l'application Internet OneTouch Reveal® ou aux comptes OneTouch Reveal® des patients. Voir [Ajouter le compte d'un utilisateur de l'établissement](#).

Sélectionner un utilisateur de l'établissement de santé

Vous pouvez rechercher un utilisateur qui a déjà été ajouté à votre établissement. Vous pouvez rechercher un utilisateur de l'établissement à l'aide de la case **Rechercher un utilisateur**, faire défiler la liste des utilisateurs de l'établissement ou trier par nom. Voir [Sélectionner un utilisateur de l'établissement](#).

Sélectionner les tâches d'un utilisateur de l'établissement

Chacune des tâches suivantes est appliquée à un utilisateur de l'établissement ou aux patients de cet utilisateur. Dès que vous sélectionnez un utilisateur de l'établissement, vous pouvez effectuer n'importe laquelle des tâches suivantes.

Modifier les informations générales d'un utilisateur de l'établissement de santé

Vous pouvez modifier les informations personnelles d'un utilisateur de l'établissement telles que le nom. Voir [Modifier les informations générales d'un utilisateur de l'établissement](#).

Modifier les coordonnées d'un utilisateur de l'établissement de santé

Vous pouvez modifier l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'un utilisateur de l'établissement. Voir [Modifier les coordonnées de l'utilisateur de l'établissement](#).

Modifier le mot de passe d'un utilisateur de l'établissement de santé

Vous pouvez changer le mot de passe OneTouch Reveal® de n'importe quel utilisateur de l'établissement. Voir [Changer le mot de passe de l'utilisateur de l'établissement](#).

Modifier le rôle de gestionnaire de l'établissement de santé

Vous pouvez affecter le rôle d'administrateur de l'établissement à n'importe quel utilisateur de l'établissement ou supprimer ce rôle d'un administrateur de l'établissement. Voir [Modifier le rôle d'administrateur de l'établissement](#).

Sélectionner la langue d'un utilisateur de l'établissement de santé

Vous pouvez choisir, parmi les langues disponibles, la langue affichée par l'application Internet OneTouch Reveal® pour un utilisateur de l'établissement. Voir [Sélectionner la langue d'un utilisateur de l'établissement](#).

Supprimer un utilisateur de l'établissement de santé

Vous pouvez supprimer un utilisateur de l'établissement et effacer son compte OneTouch Reveal®. Voir [Supprimer un utilisateur de l'établissement](#).

Modifier les préférences des rapports d'un utilisateur de l'établissement de santé

Vous pouvez régler les préférences des rapports pour tous les patients d'un utilisateur de l'établissement. Voir [Modifier les préférences des rapports d'un utilisateur de l'établissement](#). Vous pouvez choisir, sous Préférences des rapports, le rapport par défaut de l'utilisateur de l'établissement, régler une période par défaut et choisir les rapports qui seront imprimés lorsque l'impression par lots sera sélectionnée pour cet utilisateur de l'établissement. L'application Internet vous permet de régler les préférences des rapports séparément pour les rapports du lecteur et ceux de la pompe. Par exemple, vous pouvez choisir le rapport Résumé des données du patient comme rapport par défaut pour les rapports du lecteur et le rapport Aperçu de la journée comme rapport par défaut pour les patients utilisant des pompes. Le rapport par défaut est le premier rapport affiché pour chacun des patients d'un utilisateur de l'établissement.

La période par défaut vous permet de sélectionner 14, 30 ou 90 jours ou une plage personnalisée. Cette plage par défaut s'applique aux données présentées dans les rapports compatibles avec votre sélection.

Voir [Aperçu des détails des rapports](#) pour de plus amples informations sur chaque rapport.

Modifier les options des rapports d'un utilisateur de l'établissement de santé

Options du rapport énumèrent certaines options qui seront appliquées aux rapports pour un utilisateur du compte Établissement de santé. Voir [Modifier les options du rapport de l'établissement](#).

Pour plus d'informations sur les préférences des rapports, consultez [Rudiments de l'application Internet OneTouch Reveal](#) et [Hiérarchie des préférences](#).

Déclasser ment de santé

Étapes à suivre pour déclasser un établissement de l'application Internet OneTouch Reveal®. Voir [Déclasser un établissement](#).

Instructions relatives aux tâches de l'onglet Utilisateurs de l'établissement

Ajouter le compte d'un utilisateur de l'établissement

Créez le compte d'un utilisateur de l'établissement.

Vous allez créer le nom d'utilisateur de l'utilisateur de l'établissement ; une fois enregistré, il ne pourra pas être modifié.

1. Cliquez sur **Utilisateurs de l'établissement**.
2. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.
3. Entrez **Informations générales**.
4. Entrez **Coordonnées**.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
6. Sélectionnez une langue dans la liste déroulante.
7. Cochez la case **Cet utilisateur est un administrateur de l'établissement** si vous souhaitez donner à cet utilisateur les privilèges des administrateurs de l'établissement.
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.
9. Cliquez sur **Imprimer le résumé de l'inscription** pour fournir des instructions permettant à l'utilisateur de l'établissement de s'inscrire et de terminer son inscription.

Le compte de l'utilisateur de l'établissement a été créé dans votre établissement. Si vous devez ajouter un autre utilisateur de l'établissement, cliquez sur **Ajouter un autre utilisateur** et répétez les mêmes étapes.

Sélectionner un utilisateur de l'établissement

1. Cliquez sur **Utilisateurs de l'établissement**.

Une liste de noms d'utilisateur s'affiche.

2. Recherchez l'utilisateur.

- Faites défiler la liste de noms.

REMARQUE : Pour trier la liste de noms, cliquez sur les en-têtes de colonnes suivantes.

- Effectuez une recherche dans la liste en tapant le nom ou l'identifiant professionnel de l'utilisateur dans la case **Rechercher un utilisateur**. La liste de noms des utilisateurs est filtrée au fur et à mesure que vous tapez.

3. Cliquez sur le nom de l'utilisateur.

Le compte de l'utilisateur d'établissement s'affiche pour permettre la modification de ses informations ou de ses préférences.

Modifier les informations générales d'un utilisateur de l'établissement

Modifiez le nom, le suffixe, la spécialité et l'identifiant professionnel.

1. Sélectionner un utilisateur de l'établissement de santé. Voir [Sélectionner un utilisateur de l'établissement](#).

La page du profil de l'utilisateur s'affiche.

2. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Informations générales**.
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier les coordonnées de l'utilisateur de l'établissement

Modifiez l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique.

1. Sélectionner un utilisateur de l'établissement de santé. Voir [Sélectionner un utilisateur de l'établissement](#).
2. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Coordonnées**.
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Changer le mot de passe de l'utilisateur de l'établissement

Le mot de passe doit comporter entre 8 et 16 caractères et doit contenir au moins une lettre et au moins un chiffre.

1. Sélectionner un utilisateur de l'établissement de santé. Voir [Sélectionner un utilisateur de l'établissement](#).
2. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Mot de passe**.
3. Changez le mot de passe.

Vous n'avez pas besoin du mot de passe actuel, mais vous devez taper le nouveau mot de passe deux fois.

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre de confirmation.

Modifier le rôle d'administrateur de l'établissement

Affectez ou supprimez le rôle d'administrateur de l'établissement.

1. Sélectionner un utilisateur de l'établissement de santé. Voir [Sélectionner un utilisateur de l'établissement](#).
2. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Rôle de l'utilisateur**.
3. Cliquez sur la case **Cet utilisateur est un administrateur de l'établissement**.

Une case cochée signifie que cet utilisateur de l'établissement est désormais un administrateur de l'établissement. Une case décochée signifie que cet utilisateur de l'établissement n'est pas un administrateur de l'établissement.

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Sélectionner la langue d'un utilisateur de l'établissement

1. Sélectionner un utilisateur de l'établissement de santé. Voir [Sélectionner un utilisateur de l'établissement](#).

2. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Langue**.
3. Sélectionnez la langue dans la liste déroulante.

REMARQUE : Seules les langues prises en charge pour votre pays sont affichées.

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Supprimer un utilisateur de l'établissement

REMARQUE : Avant de supprimer un utilisateur de l'établissement, vous devez réaffecter ses patients à un autre utilisateur.

1. Sélectionner un utilisateur de l'établissement de santé. Voir [Sélectionner un utilisateur de l'établissement](#).
2. Cliquez sur **Supprimer**.
3. Utilisez la liste déroulante pour affecter les patients à un autre utilisateur de l'établissement.
4. Cliquez sur **Oui**.

L'utilisateur de l'établissement a été supprimé et tous les patients ont été affectés à l'utilisateur de l'établissement choisi.

Modifier les préférences des rapports d'un utilisateur de l'établissement

Modifiez les rapports d'affichage et d'impression.

1. Sélectionner un utilisateur de l'établissement de santé. Voir [Sélectionner un utilisateur de l'établissement](#).
2. Sélectionnez l'onglet correspondant au type de rapport que vous souhaitez gérer.
3. Cliquez sur **Modifier**.
4. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Pour	Procédez ainsi
Sélectionner un rapport par défaut	Dans la liste déroulante, sélectionnez le rapport que vous voulez voir à l'écran lorsque vous affichez les rapports d'un patient.
Sélectionner une période par défaut	Dans la liste déroulante, sélectionnez le nombre de jours (par exemple 14, 30 ou 90 jours) que vous voulez inclure dans chaque rapport.
Sélectionner des rapports pour l'impression par lots	Cochez la case en regard de chaque rapport que vous voulez imprimer lorsque vous choisissez l'option d'impression par lots (plusieurs rapports). Les rapports BGM sont énumérés sous leur fonction principale (Résumer, Analyser ou Inspecter).

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier les options du rapport de l'établissement

Modifiez les options d'affichage et d'impression des rapports.

1. Sélectionner un utilisateur de l'établissement de santé. Voir [Sélectionner un utilisateur de l'établissement](#).
2. Cliquez sur **Options du rapport**.
3. Cliquez sur **Modifier** à droite de **Options du rapport**.
4. Cochez la case en regard de chaque option voulue.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Déclasser un établissement

Si vous souhaitez supprimer votre établissement de l'application Internet OneTouch Reveal®, l'administrateur de l'établissement doit d'abord supprimer tous les patients de l'établissement. Voir [Supprimer un patient de](#)

l'établissement. Une fois que vous avez terminé, veuillez contacter le service client à l'adresse contact@onetouch.be ou au 0800 14660 (BE) ou 800 25749 (LU) (Lignes en service du lundi au vendredi, de 8h à 17h) pour finaliser le processus.

Chapitre

4

Détails des rapports

Aperçu des détails des rapports

La section Détails des rapports fournit une description de chaque rapport et un aperçu des couleurs et des symboles, des messages, des tendances et des notes de bas de page qui peuvent apparaître dans les rapports. Lorsque les rapports sont imprimés, des informations supplémentaires comme l'identification du patient, les plages d'objectif du patient et le numéro de série du dispositif sont incluses. Les rapports OneTouch Reveal® contiennent des données provenant des dispositifs de surveillance de la glycémie du patient et des pompes à insuline.

REMARQUE : Les graphiques des rapports peuvent ne pas être générés si les données des patients sont insuffisantes.

Rubriques de la section Détails des rapports

Couleurs et symboles utilisés dans les rapports

Les rapports OneTouch Reveal® utilisent divers formats pour présenter les données, notamment des graphiques, des diagrammes, des tableaux et du texte. Pour revoir les couleurs et les symboles utilisés dans la présentation de ces données, voir [Couleurs et symboles utilisés dans les rapports](#).

Messages sur les tendances

L'application Internet identifie des tendances et génère des messages dans des rapports tels que Résumé des données du patient, Rapport d'avancement du patient, Analyse de l'excursion, Analyse de l'observance, Détails par heure de la journée et Détails par jour de la semaine. Pour plus d'informations sur les messages de motif, voir [Messages liés aux tendances](#).

REMARQUE :

- Les messages liés aux tendances sont générés uniquement lorsqu'au moins un résultat glycémique a été généré dans la plage acceptable par un dispositif.
- Les tendances détectées peuvent être différentes entre l'appareil mobile OneTouch Reveal® et les applications Internet.

Notes de bas de page dans les rapports

Dans certaines conditions, les rapports contiennent des notes de bas de page. Les notes de bas de page fournissent des explications supplémentaires facilitant la compréhension des rapports et de leur contenu. Pour plus d'informations sur les notes de bas de page dans les rapports, voir [Notes de bas de page dans les rapports](#).

Description des rapports

L'application Internet OneTouch Reveal® propose plusieurs rapports qui contribuent à évaluer la surveillance du glucose et l'administration d'insuline. Cette section comprend une description de chaque rapport.

- Rapport AGP BGM, voir [Rapport AGP BGM](#).
- Résumé des données BGM du patient, voir [Résumé des données du patient BGM](#).
- Rapport d'avancement et carnet, voir [Rapport d'avancement et carnet](#).
- Analyse de l'excursion, voir [Rapport Analyse de l'excursion](#).
- Analyse de l'observance, voir [Rapport Analyse de l'observance](#).
- Rapport journalier, voir [Rapport Aperçu de la journée](#).
- Carnet, voir [Rapport Carnet](#).
- Liste de données, voir [Rapport Liste de données](#).
- Détails par jour de la semaine, voir [Rapport Synthèse par jour de la semaine](#).
- Détails par heure de la journée, voir [Rapport Synthèse par heure de la journée](#).

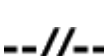
REMARQUE : Les résultats de glycémie saisis manuellement dans l’appli mobile ne figurent pas dans les rapports générés sur cette application Internet.

Couleurs et symboles utilisés dans les rapports

Les rapports OneTouch Reveal® utilisent divers formats pour présenter les données, notamment des graphiques, des diagrammes, des tableaux et du texte. La plupart des rapports OneTouch Reveal® sont organisés en sections. En haut de chaque section figure une légende pour tout symbole susceptible d’être utilisé. Tous les symboles ne sont pas utilisés dans tous les rapports. Différentes couleurs sont également utilisées dans les rapports lors de leur affichage à l’écran ou pour les imprimer. Les couleurs peuvent varier légèrement entre les rapports à l’écran et les rapports imprimés. À titre de référence, voici les couleurs et les symboles utilisés dans la plupart des rapports.

Tableau 1. Couleurs et symboles utilisés dans les rapports

Propriété	Symbole
Sans information	 Inf. à l'objectif  Dans l'objectif  Sup. à l'objectif
Glycémie avant repas	 Inf. à l'objectif  Dans l'objectif  Sup. à l'objectif
Glycémie après repas	 Inf. à l'objectif  Dans l'objectif  Sup. à l'objectif
Glycémie moy.	
Objectifs globaux	
25e percentile de glycémie	
75e percentile de glycémie	
Glucides	
Insuline	
Insuline avec correction de la glycémie	

Propriété	Symbole
Insuline avec correction des repas	
Insuline avec les deux corrections	
Insuline sans correction	
Remplacement du bolus vers le haut	
Remplacement du bolus vers le bas	
Basal temp.	
Interrompre	
Reprendre	
Remplir la canule	
Amorcer	
Tendances	

Messages liés aux tendances

Les messages liés aux tendances indiquent les tendances glycémiques et de l'administration d'insuline détectées à partir des données du dispositif du patient. Les messages de tendances apparaissent dans les rapports Résumé des données du patient, Rapport d'avancement du patient, Analyse de l'excursion, Analyse de l'observance, Détails par heure de la journée et Détails par jour de la semaine.

REMARQUE :

- Les messages liés aux tendances sont générés uniquement lorsqu'au moins un résultat glycémique a été généré dans la plage acceptable par un dispositif.
- Les messages liés aux tendances doivent uniquement servir à titre informatif, et non à prendre des décisions médicales reposant sur cette seule base. Les seuils hypoglycémiques et hyperglycémiques utilisés dans l'application Internet OneTouch Reveal® peuvent être personnalisés.
- N'oubliez pas que les actions suivantes peuvent affecter les tendances précédentes et les statistiques identifiées :
 - Modification de la plage d'objectif glycémique
 - Suppression ou ajout d'un dispositif (cette opération supprime ou ajoute également les données du dispositif)
 - Modification des informations liées au repas pour les résultats glycémiques
 - Sélection de périodes différentes pour afficher les données transférées

Pour pouvoir identifier certaines tendances, un nombre minimal de points de données est requis avant qu'un message n'apparaisse. Le nombre de points requis varie selon la tendance. Certains messages seront prioritaires par rapport à d'autres de sorte que tous les messages n'apparaîtront pas, même lorsqu'ils sont déclenchés. Par exemple, l'hypoglycémie est prioritaire par rapport à l'hyperglycémie et certains rapports affichent un maximum de trois messages de tendances.

REMARQUE : Les données entrées manuellement ne sont pas incluses dans les calculs permettant de générer des messages liés aux tendances.

Les messages de tendances sont regroupés en six catégories :

- Messages liés à l'hypoglycémie
- Messages liés à l'hyperglycémie
- Messages liés à la variabilité
- Messages liés à l'analyse comparative
- Messages liés à l'observance
- Messages liés aux tests, aux dosages et aux tendances des données

Notes de bas de page dans les rapports

Dans certains cas, les rapports comportent des notes en bas de page offrant davantage d'informations pour vous aider à mieux comprendre les rapports et leur contenu. Le tableau suivant indique les notes de bas de page et les motifs de leur création.

Tableau 1. Notes de bas de page

Note de bas de page	Motif
Selon la valeur minimale autorisée d'un dispositif, les graphiques et les calculs statistiques utilisent une valeur minimale pour la glycémie signalée comme « BASSE ». La valeur correspond à la valeur minimale autorisée pour le dispositif - 1 mg/dL. Consultez le manuel d'utilisation de votre dispositif afin de déterminer la valeur minimale autorisée.	Générée lorsque le rapport comporte des glycémies inférieures à la plage de mesures définie pour un dispositif donné.
Les résultats glycémiques supérieurs à la valeur maximale du dispositif sont indiqués par ÉLEVÉE.	Générée lorsque le rapport comporte des glycémies supérieures à la plage de mesures définie pour un dispositif donné.
Selon la valeur maximale autorisée d'un dispositif, les graphiques et les calculs statistiques utilisent une valeur maximale pour la glycémie signalée comme « ÉLEVÉE ». La valeur correspond à la valeur maximale autorisée pour le dispositif + 1 mg/dL. Consultez le manuel d'utilisation de votre dispositif afin de déterminer la valeur maximale autorisée.	Générée lorsque le rapport comporte des glycémies supérieures à la plage de mesures définie pour un dispositif donné.
Les informations repas risquent de ne pas être exactes si l'horloge du lecteur est incorrecte ou si des créneaux repas n'ont pas été respectés par le patient.	Générée lorsqu'un rapport comporte des données issues de certains lecteurs OneTouch®. Consultez le manuel d'utilisation de votre dispositif.

Note de bas de page	Motif
Ce rapport comporte des données issues d'un dispositif dont le réglage de date et/ou d'heure divergeait de plus de 15 minutes par rapport à l'horloge du système lors du transfert des données. Cela pourrait nuire à l'exactitude des rapports.	Générée lorsqu'une divergence est détectée entre l'horloge du dispositif et l'horloge du système au cours du transfert des données.
Ce rapport comporte des données d'insuline émanant de plusieurs lecteurs ou pompes, ce qui peut nuire à l'exactitude du contenu en raison d'entrées redondantes possibles.	Générée lorsqu'un rapport contient des données d'insuline provenant de plusieurs dispositifs pour un patient.
Cette période comporte des données d'insuline émanant d'un lecteur et d'une pompe. Les données d'insuline émanant du lecteur ont été exclues de ce rapport car elles peuvent nuire à l'exactitude du contenu.	Générée lorsqu'un rapport comporte des données d'insuline émanant d'au moins une pompe et d'au moins un lecteur.

Profil de glycémie ambulatoire (AGP)

Le rapport sur le profil de glycémie ambulatoire (AGP) est un rapport glycémique d'une seule page, normalisé par l'industrie, créé par le Centre international du diabète pour l'interprétation rétrospective des données glycémiques. Il comprend des statistiques récapitulatives, un graphique des profils de glycémie et des profils de glycémie quotidiens. Le rapport AGP est cohérent quel que soit le dispositif.

REMARQUE : Le rapport AGP utilise des seuils spécifiques normalisés par l'industrie qui peuvent être différents des plages cibles personnalisées définies par un utilisateur individuel ou son professionnel de santé. Par conséquent, le rapport AGP peut différer des autres rapports et graphiques de votre appareil mobile et de vos applications Internet. En outre, les couleurs du rapport AGP seront différentes de celles de votre appareil mobile et de vos applications Internet.

Pour plus d'informations sur le contenu d'un rapport AGP, veuillez consulter le site Web du Centre international du diabète : <http://www.agpreport.org/agp/agpreports>.

Rapport AGP BGM

Ce rapport fournit des informations qui vous aident, à prendre des décisions et à suivre un traitement en affichant les données de glycémie dans un rapport d'une seule page.

Résumé des données du patient BGM

Une vue d'ensemble des tendances glycémiques, des excursions et de la glycémie en fonction de l'heure de la journée. Ce rapport peut porter sur une période de 14, 30, 90 jours, ou sur une période personnalisée.

Contenu du rapport

- Tendances des données glycémiques
- Statistiques comparatives permettant d'afficher les données glycémiques de la période actuelle par rapport à la précédente pour les valeurs suivantes :
 - Glycémie moyenne globale
 - écart-type
 - nombre de résultats
 - le nombre moyen de lectures par jour
 - pourcentage de résultats avec informations liées au repas
 - Glycémie moyenne avant le repas
 - Glycémie moyenne après le repas
- Les excursions de glycémie, y compris ce qui suit :
 - pourcentage de résultats glycémiques globaux inférieurs, égaux et supérieurs à la plage cible
 - le nombre de résultats glycémiques globaux inférieurs et supérieurs à la plage cible
 - le nombre de résultats glycémiques qualifiés « Avant repas » inférieurs et supérieurs à la plage cible

- le nombre de résultats glycémiques qualifiés « Après repas » inférieurs et supérieurs à la plage cible
- le nombre de résultats glycémiques dans les plages Très basse et Très élevée
- valeur la plus basse de la glycémie
- le résultat de glycémie le plus élevé
- Glycémie par heure de la journée, y compris ce qui suit :
 - les résultats de glycémie en fonction de l'heure de la journée
 - la moyenne de la glycémie dans le temps
 - la dose moyenne de bolus d'insuline dans le temps
 - la moyenne des glucides dans le temps
 - la ligne moyenne (si les 25e/75e percentiles ne sont pas sélectionnés)
 - 25e/75e percentiles (si sélectionnés)
 - la ligne médiane (si les 25e/75e percentiles sont sélectionnés)
 - le glucose médian dans le temps (si sélectionné)

Rapport d'avancement et carnet

Il s'agit de la version du rapport que votre patient voit sur son application mobile OneTouch Reveal[®], présentant un aperçu d'avancement, notamment des moyennes par mois et un carnet.

Ce rapport peut porter sur une période de 14, 30, 90 jours, ou sur une période personnalisée.

Contenu du rapport

- Une période Aperçu par rapport à la période précédente pouvant être sélectionnée
- Tendances des résultats et moyennes
- Les 4 tendances les plus récentes
- Résultats et moyennes par mois
- Présentation du carnet

Rapport Analyse de l'excursion

Aperçu des excursions ou des résultats de glycémie qui sont inférieurs ou supérieurs aux **Plages d'objectifs** du patient, ainsi que des tendances de variabilité.

Ce rapport peut porter sur une période de 14, 30, 90 jours, ou sur une période personnalisée.

Contenu du rapport

- Un graphique des excursions globales
- Un graphique des excursions par heure de la journée
- Un graphique des excursions par jour de la semaine

Rapport Analyse de l'observance

Aperçu des données d'observance des tests de glycémie et des activités de la pompe.

Ce rapport peut porter sur une période de 14, 30, 90 jours, ou sur une période personnalisée.

Contenu du rapport

- Les 4 tendances d'observance les plus récentes
- Les moyennes, y compris ce qui suit :
 - le nombre moyen de lectures et de tendances du lecteur par jour
 - le nombre moyen d'événements du calculateur de bolus par jour avec répartition par type d'événement
 - le nombre moyen de bolus manuels et d'amorces par jour
- Analyse par date, y compris les éléments suivants :
 - tendances des résultats glycémiques et moyennes
 - le nombre de résultats et les tendances du lecteur
 - le nombre d'événements liés au calculateur de bolus avec répartition par type d'événement
 - le nombre d'événements liés à la pompe avec répartition par type d'événement

Rapport Aperçu de la journée

Aperçu par heure de la journée des résultats glycémiques, de l'apport en glucides et des données sur les doses d'insuline.

Ce rapport peut porter sur une période de 14, 30, 90 jours, ou sur une période personnalisée.

Contenu du rapport

- Intègre les données du lecteur de glycémie et des dispositifs compatibles dans un aperçu par heure de la journée.

Rapport Carnet

Le rapport Carnet regroupe les résultats glycémiques, les doses de bolus et d'autres événements dans un tableau. Chaque colonne du tableau du rapport Carnet représente une heure (il y a deux cycles de 12 à 11, un pour les heures du matin et un pour les heures de l'après-midi). Les lignes du tableau représentent le jour de la semaine et la date, mais chacun de ces jours est subdivisé en lignes qui affichent des données telles que les résultats de glycémie, les glucides, les doses d'insuline basale et les doses d'insuline bolus.

Ce rapport peut porter sur une période de 14, 30, 90 jours, ou sur une période personnalisée.

Contenu du rapport

- Affichage des résultats glycémiques par heure de la journée
- Plusieurs statistiques, notamment :
 - Glycémie moyenne
 - Prise totale d'insuline
 - Quantité totale de glucides

Rapport Liste de données

Liste exhaustive de tous les événements pour une période sélectionnée.

Ce rapport peut porter sur une période de 14, 30, 90 jours, ou sur une période personnalisée.

Contenu du rapport

- Une liste exhaustive des données capturées par le dispositif qui peut être triée comme suit :
 - par date d'enregistrement ou dans l'ordre de réalisation des lectures ;
 - par type de résultat ;
 - par source de données

Rapport Synthèse par jour de la semaine

Synthèse de la glycémie, de l'insuline et de l'absorption de glucides par heure du jour pour une période sélectionnée.

Ce rapport peut porter sur une période de 14, 30, 90 jours, ou sur une période personnalisée.

Contenu du rapport

- Graphiques de la glycémie par jour de la semaine
- Statistiques clés pour chaque jour de la semaine, y compris les suivantes :
 - Résultat le plus élevé
 - Résultat le plus bas
 - Valeur médiane
 - Glycémie moyenne
 - Écart type
 - Nombre total de résultats glycémiques
- Graphiques des dosages d'insuline et des données relatives à l'apport en glucides par jour de la semaine
- Statistiques sur l'insuline pour chaque jour de la semaine

Rapport Synthèse par heure de la journée

Synthèse de la glycémie, de l'insuline et de l'absorption de glucides par heure de la journée pour une période sélectionnée.

Ce rapport peut porter sur une période de 14, 30, 90 jours, ou sur une période personnalisée.

Contenu du rapport

- Graphique de la glycémie par heure de la journée
- Statistiques clés pour chaque période tout au long de la journée, notamment :
 - Résultat le plus élevé
 - Résultat le plus bas
 - Valeur médiane
 - Glycémie moyenne
 - Écart type
 - Nombre total de résultats glycémiques
- Graphiques des dosages d'insuline et des données relatives à l'apport en glucides par heure de la journée
- Statistiques sur l'apport en glucides et sur les données d'insuline pour chaque période de la journée

Chapitre

5

Transfert de données

Transfert de données

L'application Internet OneTouch Reveal® utilise les données recueillies auprès d'un ou de plusieurs dispositifs pris en charge pour générer des rapports. Pour transférer des données en utilisant le logiciel de transfert de données, vous devez d'abord l'installer.

Une fois que vous vous identifiez dans l'application Internet OneTouch Reveal®, un lien permettant de télécharger et d'installer le logiciel de transfert de données est affiché dans l'angle supérieur droit de l'écran.

REMARQUE :

Pour obtenir la liste complète des dispositifs pris en charge, cliquez sur le lien suivant :

OneTouchReveal.be/support/fr_BE/

L'application Internet OneTouch Reveal® utilise des protocoles d'authentification et de cryptage de bout en bout pour sécuriser vos informations. N'utilisez pas d'autres câbles, périphériques ou moyens pour transférer Les données.

Installer le logiciel de transfert de données OneTouch Reveal®

Le logiciel de transfert de données offre un moyen permettant de transférer les données depuis un dispositif pris en charge vers l'application Internet OneTouch Reveal®. Vous devez l'installer pour pouvoir transférer des données.

REMARQUE : Vous devez posséder un compte OneTouch Reveal® pour pouvoir utiliser le logiciel de transfert de données.

Instructions d'installation :

1. Connectez-vous à votre compte OneTouch Reveal®.
2. Cliquez sur le lien **Logiciel de transfert de données**.
Il se trouve en haut, à droite de chaque écran.
3. Suivez les instructions pour terminer l'installation.
4. Assurez-vous qu'un câble USB OneTouch® n'est pas connecté à votre ordinateur et cliquez sur **OK**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Une fenêtre contextuelle s'ouvre lorsque l'installation est terminée. Le cas échéant, cochez **Créer une icône Bureau** pour placer un raccourci sur votre bureau. Vous pouvez également choisir de lancer le logiciel de transfert de données lorsque vous démarrez votre ordinateur.

6. Cliquez sur **Terminer**.

REMARQUE : Après l'installation, vous serez peut-être invité à redémarrer votre ordinateur.

Transférer les données d'un dispositif à l'aide du logiciel de transfert de données

Vous ne pouvez transférer les données vers l'application Internet OneTouch Reveal® que depuis un dispositif pris en charge. Pour obtenir la liste complète des dispositifs pris en charge, ainsi que des instructions de connexion et autres informations

pertinentes relatives à ces dispositifs, cliquez sur le lien suivant : OneTouchReveal.be/support/fr_BE/. Assurez-vous d'utiliser le câble approprié pour le transfert des données depuis le dispositif.

1. Connectez le dispositif à votre ordinateur en utilisant le câble adéquat.

Ouvrez le logiciel de transfert de données OneTouch Reveal® et suivez les instructions pour trouver votre dispositif connecté. Le logiciel de transfert de données OneTouch Reveal® recherche le dispositif. Lorsque le dispositif est trouvé, un écran de confirmation s'affiche.

2. Identifiez-vous auprès de l'application Internet OneTouch Reveal® avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Cette étape sera ignorée si vous avez fourni ces informations précédemment et avez choisi de mémoriser vos informations d'identification.

3. Cliquez sur **Confirmer** pour transférer les données.

REMARQUE :

- Si l'heure réglée sur le dispositif et l'heure réglée sur l'ordinateur diffèrent de plus de 15 minutes, une fenêtre contextuelle vous invitera à les synchroniser. Cliquez dessus **Oui** si vous voulez que l'heure du dispositif corresponde à l'heure de l'ordinateur. Cette fenêtre n'apparaît pas si vous choisissez de les synchroniser systématiquement dans l'onglet **Réglages**.
- Lors du transfert des données, vous pouvez cliquer sur **ANNULER** à tout moment pour arrêter le transfert de toutes les données, peu importe la raison. Les données sont stockées dans l'application Internet OneTouch Reveal® uniquement une fois le transfert de données terminé.

4. Une fenêtre contextuelle s'ouvre lorsque le transfert est terminé, avec des options permettant d'afficher les rapports du patient ou d'affecter le dispositif.

Menu du logiciel de transfert de données

Vous pouvez accéder aux réglages du logiciel de transfert de données les plus couramment utilisés en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône () dans la barre d'état (PC) ou la barre de menu (Mac).

Réglages

Un clic sur **Réglages** ouvre les onglets **Réglages**, **Informations d'identification**, **Dispositifs** et **Aide** du logiciel de transfert de données. Voir [Personnaliser les réglages du logiciel de transfert de données](#) pour des instructions sur la modification de ces réglages.

Rechercher mon dispositif

Lorsque vous sélectionnez le type de votre dispositif connecté, le logiciel de transfert de données commence à rechercher un dispositif pris en charge qui est connecté à votre ordinateur à l'aide du câble approprié.

Réglages de communication du dispositif

Si **Désactiver la détection automatique de dispositif** n'est pas sélectionné dans **Réglages de communication du dispositif** de l'onglet **Réglages**, le **Logiciel de transfert de données** recherchera automatiquement un dispositif.

Afficher les journaux

Lorsque vous sélectionnez **Afficher les journaux**, des informations techniques relatives à un transfert de données s'affichent.

Effacer le dispositif

Le logiciel de transfert de données peut être utilisé pour effacer les données stockées de certains dispositifs pris en charge. Voir [Effacer le dispositif à l'aide du logiciel de transfert de données](#) pour des instructions.

Aide

Fournit un lien vers le présent manuel d'utilisation et d'autres coordonnées pour obtenir une assistance.

Quitter

Ferme le logiciel de transfert de données.

Effacer le dispositif à l'aide du logiciel de transfert de données

Le logiciel de transfert de données peut être utilisé pour effacer les données stockées sur certains dispositifs pris en charge. Pour obtenir la liste des dispositifs et des informations sur la suppression possible des données, cliquez sur le lien suivant :

OneTouchReveal.be/support/fr_BE/.

Une fois effacées, les données du dispositif qui ont déjà été téléchargées à l'aide du **Logiciel de transfert de données** ne seront disponibles que via l'application Internet OneTouch Reveal®.

1. Connectez le dispositif à votre ordinateur en utilisant le câble adéquat.

Ouvrez le logiciel de transfert de données OneTouch Reveal® et sélectionnez votre type de dispositif connecté. Le logiciel de transfert de données OneTouch Reveal® recherche le dispositif. Lorsque le dispositif est trouvé, un écran de confirmation s'affiche.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Logiciel de transfert de données** () dans la barre d'état (PC) ou la barre de menu (Mac).

3. Cliquez sur **Effacer le dispositif** dans le menu contextuel.

4. Cliquez sur **Effacer le dispositif** pour effacer définitivement les données du dispositif.

Une fenêtre contextuelle confirmera l'effacement des données.

5. Cliquez sur **OK** pour fermer le message de confirmation.

Personnaliser les réglages du logiciel de transfert de données

Le logiciel de transfert de données est installé avec des réglages par défaut que vous pouvez personnaliser en l'ouvrant et en modifiant les onglets **Réglages**, **Informations d'identification**, **Dispositifs** et **Aide**.

Onglet Réglages

Dans l'onglet **Réglages**, vous pouvez personnaliser les options suivantes :

- Sélectionnez **Accéder à l'application Internet OneTouch Reveal® après chaque transfert** si vous souhaitez que le logiciel de transfert de données ouvre votre navigateur par défaut et vous connecte à l'application Internet OneTouch Reveal® après un transfert de données réussi.
- Sélectionnez **Afficher l'écran de démarrage** pour afficher l'écran de démarrage chaque fois que vous lancez le logiciel de transfert de données.

Vous pouvez utiliser **Réglages de communication du dispositif** pour configurer la capacité du logiciel de transfert de données à trouver automatiquement un dispositif pris en charge lorsqu'il est connecté à votre ordinateur.

- Sélectionnez **Désactiver la détection automatique de dispositif** si vous ne souhaitez pas que le logiciel de transfert de données trouve automatiquement un dispositif lorsque vous le connectez à votre ordinateur à l'aide du câble approprié.
- Utilisez les flèches ou saisissez un nombre dans le champ **Intervalle d'interrogation** pour spécifier la fréquence à laquelle le logiciel de transfert de données recherchera un dispositif connecté.
- Utilisez la liste déroulante **Port** si vous voulez spécifier le port à utiliser pour connecter le dispositif. Sélectionnez **Recherche automatique** si vous voulez que le logiciel de transfert de données recherche tous les ports disponibles pour un dispositif connecté.
- Utilisez **Réglages de synchronisation de l'horloge** pour choisir si vous voulez ou non régler automatiquement l'heure du dispositif sur l'heure système de l'ordinateur lorsque la différence excède 15 minutes.

Onglet Informations d'identification

Vous pouvez configurer le logiciel de transfert de données pour vous identifier auprès de l'application Internet OneTouch Reveal® sans entrer votre nom d'utilisateur ou votre adresse électronique et votre mot de passe chaque fois

que vous transférez des données. Pour activer l'identification automatique, cochez la case et entrez les informations **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** requises.

Onglet Dispositifs

Dans l'onglet **Dispositifs**, vous pouvez afficher les dispositifs pris en charge dans votre pays.

Onglet Aide

L'onglet **Aide** fournit un lien vers le présent manuel d'utilisation et d'autres coordonnées pour obtenir de l'aide.

Affecter le dispositif d'un patient

Lorsqu'un dispositif est reconnu comme étant celui d'un patient existant de l'établissement, les données sont automatiquement affectées au patient en question.

Dans le cas contraire, une icône Avis est affichée dans l'en-tête de l'application Internet OneTouch Reveal®. Cliquez sur cette icône pour accéder à l'option vous permettant d'affecter le dispositif au nouveau patient. Une fois attribuées, les données du patient seront stockées dans l'application Internet OneTouch Reveal®.

Créer un rapport d'invité sans affecter le dispositif d'un patient

L'application Internet OneTouch Reveal® vous permet de créer un rapport d'invité sans affecter le dispositif à un compte patient. Vous pouvez télécharger ces rapports jusqu'à ce que les données soient effacées de la file d'attente ou jusqu'à 48 heures après le chargement des données, mais les données ne sont pas stockées dans l'application Internet OneTouch Reveal® de manière permanente jusqu'à ce que vous les affectiez à un patient. La période affichée dans le rapport d'invité sera toujours les 14 derniers jours. Ni la période ni la plage cible des concentrations en glucose ne sont personnalisables.

Pour créer le rapport d'invité :

1. Connectez le dispositif de votre patient à votre ordinateur.
2. Ouvrez le logiciel de transfert de données et suivez les instructions pour sélectionner votre dispositif.
3. Cliquez sur **Ouvrez l'application Web** une fois le chargement des données terminé.
4. Dans l'application Internet, cliquez sur l'icône Notification dans l'en-tête de l'onglet Patients ou Dispositifs à affecter dans la barre de notification.
5. Cliquez sur **Créer un rapport d'invité** pour consulter les options du rapport.

Désinstaller le logiciel de transfert de données OneTouch Reveal®

Si vous souhaitez désinstaller le logiciel de transfert de données, suivez ces instructions :

Assurez-vous que l'application de transfert de données n'est pas en cours d'exécution.

Windows :

1. Accédez aux réglages.
2. Accédez à Ajouter/Supprimer des programmes.
3. Recherchez le logiciel de transfert de données.
4. Cliquez sur Désinstaller/Supprimer.

Cela déclenchera le programme de désinstallation de Windows et supprimera le programme de votre PC.

Mac :

1. Recherchez le logiciel de transfert de données dans votre dossier Applications.
2. Faites glisser le logiciel de transfert de données vers la Corbeille.
3. Videz la Corbeille.

Chapitre

6

Ressources

Ressources

Cette section contient des informations supplémentaires qui peuvent s'avérer utiles.

Glossaire

Ce glossaire définit les termes utilisés dans l'application Internet OneTouch Reveal[®] et le manuel d'utilisation l'accompagnant, ainsi que certains termes médicaux courants associés au diabète.

Rapport Analyse de l'observance

Un rapport de l'application Internet OneTouch Reveal[®] qui fournit un aperçu des données d'observance des tests de glycémie et des activités de la pompe, pour une période sélectionnée.

Rapport du profil de glycémie ambulatoire (AGP)

Un rapport d'une seule page, normalisé par l'industrie, créé par le Centre international du diabète pour l'interprétation rétrospective des données glycémiques.

Glycémie moyenne

Moyenne arithmétique d'un ensemble de résultats de glycémie.

Dose basale

Quantité continue d'insuline dont le corps a besoin tout au long de la journée.

Surveillance de la glycémie (BGM)

Un système d'autosurveillance de la glycémie qui mesure la glycémie à partir d'une goutte de sang prélevée sur un bâton à l'aide d'un dispositif portatif (lecteur).

Glycémie

Elle fait référence aux résultats glycémiques (glucose) d'un échantillon de sang. Le terme « glycémie » est utilisé dans les rapports pour identifier ces résultats.

Bolus

Les unités d'insuline requises pour couvrir un apport en glucides ou pour corriger une hyperglycémie.

Canule

Un tube court, fin et flexible inséré à travers la peau et raccordé à une pompe à insuline utilisée pour administrer de l'insuline sous la peau.

Mesure en continu du glucose (MCG)

Système d'autosurveillance de la glycémie qui mesure la glycémie dans le fluide interstitiel sous la peau de façon quasi continue à l'aide d'un capteur inséré à travers la peau.

Administrateur de l'établissement

Rôle dans l'application Internet OneTouch Reveal[®] disposant d'un accès complet à toutes les fonctionnalités du logiciel.

Utilisateur de l'établissement

Rôle dans l'application Internet OneTouch Reveal[®] disposant d'un accès limité aux fonctionnalités du logiciel.

Coefficient de variation

Le coefficient de variation (CV) est défini comme étant le ratio de l'écart type (ET) par rapport à la moyenne, exprimé en pourcentage. $CV \% = 100 \times ET / Moy$.

Rapport Liste de données

Rapport de l'application Internet OneTouch Reveal[®] qui fournit un affichage sous forme de tableau de toutes les données capturées par le dispositif pour une période sélectionnée, affichées dans l'ordre chronologique.

Enregistrement de données

Unité d'information contenue dans l'application Internet OneTouch Reveal[®], telle que résultat glycémique, dose d'insuline, ou autres informations (par exemple, un nom).

Plage de dates

Nombre de jours de données (14, 30, 90 jours ou une plage personnalisée) contenu dans chaque rapport de l'application Internet OneTouch Reveal[®], sauf mention contraire.

Rapport par défaut

Rapport de l'application Internet OneTouch Reveal[®] affiché en premier par défaut pour chaque patient. Le rapport par défaut peut être défini pour chaque utilisateur du compte Établissement de santé.

Valeurs par défaut

Fait référence aux plages d'objectif glycémique ou aux options de rapport prédéfinies dans l'application Internet OneTouch Reveal[®].

Rapport Synthèse par jour de la semaine

Un rapport de l'application Internet OneTouch Reveal[®] qui fournit une synthèse des résultats de glycémie, de l'insuline et de l'absorption de glucides par jour de la semaine, pour une période sélectionnée.

Rapport Synthèse par heure de la journée

Un rapport de l'application Internet OneTouch Reveal[®] qui fournit une synthèse des résultats de glycémie, de l'insuline et de l'absorption de glucides par heure du jour, pour une période sélectionnée.

Dispositif

Produit qui est une source de données sur le diabète pouvant être partagée avec l'application Internet OneTouch Reveal[®].

Numéro de série du dispositif

Un numéro de série unique qui est stocké dans la mémoire de chaque dispositif de surveillance de la glycémie. L'application Internet OneTouch Reveal[®] extrait ce numéro de série du dispositif lors du transfert des données de glycémie afin de pouvoir effectuer le suivi du dispositif d'origine des données.

Rapport Analyse de l'excursion

Un rapport de l'application Internet OneTouch Reveal[®] qui fournit une liste des tendances hyperglycémiques, hypoglycémiques, de la variabilité et de la pompe pour une période sélectionnée.

Notes de bas de page

Messages affichés au bas des rapports OneTouch Reveal[®] pour communiquer des informations supplémentaires.

Rapport d'invité

Fonctionnalité de l'application Internet OneTouch Reveal[®] qui vous permet de télécharger des rapports sans avoir attribué le dispositif à un patient. La période affichée dans le rapport d'invité sera toujours les 14 derniers jours. La plage cible est prédéfinie conformément aux directives nationales de gestion du diabète. Ni la période ni la plage cible des concentrations en glucose ne sont personnalisables.

Résultat de glycémie ÉLEVÉE

Lorsque la mention « GLYCÉMIE ÉLEVÉE » (ou « HI ») s'affiche dans un rapport en lettres majuscules, elle indique un résultat de glycémie supérieur à la plage acceptable de mesures du dispositif de surveillance.

Hyperglycémie

État d'un patient dont le taux de glucose est très élevé. Par définition clinique, l'hyperglycémie est un niveau de glycémie supérieur à 180 mg/dL.

Hypoglycémie

État d'un patient dont le taux de glucose est très bas. Par définition clinique, l'hypoglycémie est un niveau de glycémie inférieur à 70 mg/dL.

Ratio insuline/glucides (I/G)

Ratio insuline/glucides. Ce ratio indique la quantité de glucides en grammes « couverte » par chaque unité d'insuline prise. Par exemple, un ratio I/G de 1/20 indique qu'une unité d'insuline couvrira 20 grammes de glucides.

Facteur de sensibilité à l'insuline (ISF)

La quantité (mesurée en mg/dL) de chaque unité d'insuline que vous prenez réduira votre niveau de glycémie.

Rapport Aperçu de la journée

Aperçu par heure de la journée des résultats glycémiques, de l'apport en glucides et des données sur les doses d'insuline.

Écart interquartile

La distance entre le 25e percentile et le 75e percentile. L'écart interquartile représente essentiellement la plage moyenne de 50 % des données. Étant donné qu'il utilise cette plage, il n'est pas affecté par les valeurs extrêmes ou situées en dehors. Plus la distance est grande entre le 25e percentile et le 75e percentile, plus la variabilité des données est élevée.

Rapport Carnet

Un rapport de l'application Internet OneTouch Reveal[®] qui fournit une synthèse en colonnes des résultats de glycémie, de la pompe, des données relatives à l'insuline et à l'apport en glucides par heure du jour, pour une période sélectionnée.

Résultat de glycémie BASSE

Lorsque la mention GLYCÉMIE BASSE (ou LO) s'affiche dans un rapport en lettres majuscules, elle indique un résultat de glycémie inférieur à la plage acceptable de mesures du dispositif de surveillance.

Médiane

Valeur médiane dans un ensemble de valeurs (représentant la moyenne des deux valeurs du milieu lorsqu'une séquence contient un nombre égal de données).

Rapport Résumé des données du patient

Un rapport OneTouch Reveal[®] qui fournit un aperçu des tendances et des excursions des valeurs de glycémie et des tests et des dosages, ainsi que des principales statistiques comparatives pour une plage de dates sélectionnée.

Messages liés aux tendances

Messages qui apparaissent dans les rapports OneTouch Reveal[®] qui peuvent vous aider à identifier des tendances dans les données d'un patient.

PDF

Format de document (Portable Document Format) qui peut être ouvert et lu par Adobe® Acrobat® Reader®.

Intervalle d'interrogation

Intervalle entre les sessions d'interrogation. Pendant une session d'interrogation, le logiciel recherche des périphériques connectés sur l'ordinateur.

Rapport d'avancement et carnet

Voici une version du rapport OneTouch Reveal® que votre patient voit sur son appli mobile et qui présente une vue globale de l'avancement, y compris les moyennes par mois et un journal.

Réglages

Personnalisez les rapports OneTouch Reveal® pour répondre à vos besoins.

Horaire

Jour de 24 heures divisé en huit périodes qui peut être personnalisé en fonction des habitudes quotidiennes d'une personne.

Écart type (ET)

Mesure de dispersion ; indique le degré de dispersion des données relatives à la glycémie dans un certain groupe par rapport à la moyenne. Un écart standard faible indique que les résultats glycémiques sont étroitement regroupés, alors qu'un écart standard élevé indique qu'ils sont largement dispersés.

Informations

Remarque jointe à un résultat pour identifier les données de manière plus précise. L'information ajoutée peut indiquer qu'il s'agit d'un résultat Avant repas, Après repas, À jeun ou Au coucher.

Plage d'objectifs

La plage (dans les limites inférieure et supérieure de la plage de glycémie cible) des niveaux de glycémie préférés.

Période

Les huit périodes d'une journée de 24 heures utilisées pour organiser les données transférées vers l'application Internet OneTouch Reveal®.

Infobulle

Informations supplémentaires qui s'affichent lorsque vous déplacez la souris au-dessus d'un champ de texte ou d'une icône. Les champs de texte ou les icônes ne sont pas forcément tous associés à des infobulles.

Transfert

Procédure consistant à déplacer les données d'un dispositif vers l'application Internet OneTouch Reveal®.

Unité de mesure

Fait référence aux unités mg/dL. Les mesures de la glycémie sont rapportées en mg/dL.

Dispositifs pris en charge

Pour obtenir la liste complète des dispositifs pris en charge, cliquez sur le lien suivant :

OneTouchReveal.be/support/fr_BE/. Vous pouvez transférer des données à partir de tous les dispositifs répertoriés, pour lesquels vous trouverez également dans cette page des instructions de connexion. Cette page sert également de référence pour les fonctionnalités et les fonctions disponibles pour chaque dispositif pris en charge.

Pour trouver la liste des dispositifs pris en charge par l'application Internet OneTouch Reveal®, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône du logiciel de transfert de données (🔄) dans la barre d'état (PC) ou la barre de menu (Mac). Sélectionnez **Réglages**, puis **Dispositifs**. Vous pouvez alors voir la liste des dispositifs pris en charge dans votre pays.

Hierarchie des préférences

Si aucune préférence n'est réglée pour les plages d'objectifs glycémiques et les rapports, les réglages par défaut de l'application Internet OneTouch Reveal® seront utilisés.

Chaque utilisateur de l'établissement peut régler des préférences pour les plages d'objectifs glycémiques d'un patient spécifique. Les préférences de ce patient spécifique seront ensuite utilisées en tant que réglage personnalisé.

Réglage des préférences	Préférences utilisées
Aucune préférence réglée.	Réglages par défaut de l'application Internet OneTouch Reveal®.
L'utilisateur de l'établissement règle les préférences personnalisées pour un patient individuel.	Remplace les réglages par défaut de l'application Internet OneTouch Reveal®, les réglages par défaut de l'établissement (s'ils existent) et les réglages par défaut de l'utilisateur de l'établissement (s'ils existent) et devient la référence en matière de réglage personnalisé pour le patient individuel.

Dépannage

Utilisez la section Dépannage en cas de difficultés lors de l'utilisation de l'application Internet OneTouch Reveal® ou du logiciel de transfert de données. Cette section énumère les problèmes les plus courants et leurs solutions. Si vous vous trouvez dans l'incapacité de résoudre le problème, essayez d'actualiser votre navigateur. Si le problème persiste, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse contact@onetouch.be ou appeler le 0800 14660 (BE) ou 800 25749 (LU) pour contacter le support technique OneTouch Reveal®.

Impossible de transférer les données d'un dispositif vers l'application Internet OneTouch Reveal® à l'aide du logiciel de transfert de données

En cas d'échec de la communication entre le dispositif et l'application Internet OneTouch Reveal®, vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que le logiciel de transfert de données OneTouch Reveal® est installé. Le logiciel de transfert de données doit être installé pour pouvoir transférer les données d'un dispositif pris en charge vers l'application Internet OneTouch Reveal®. Pour plus d'informations sur l'installation de l'outil de transfert de données, voir [Installer le logiciel de transfert de données OneTouch Reveal](#).
- Assurez-vous que le câble utilisé pour transférer les données est correctement connecté à votre ordinateur et au dispositif.
- Assurez-vous d'avoir le câble recommandé par le fabricant du dispositif pour transférer des données. Consultez le manuel d'utilisation du dispositif pour de plus amples informations.
- Assurez-vous de transférer les données d'un dispositif pris en charge. Pour obtenir la liste complète des dispositifs pris en charge, cliquez sur le lien suivant : OneTouchReveal.be/support/fr_BE/.
- Assurez-vous que le dispositif est réglé pour transférer les données. D'une manière générale, la plupart des lecteurs doivent être éteints pour transférer les données. Pour obtenir la liste complète des dispositifs pris en charge, cliquez sur le lien suivant : OneTouchReveal.be/support/fr_BE/.
- Assurez-vous que le logiciel de transfert de données OneTouch Reveal® est réglé pour trouver automatiquement le dispositif. Pour plus d'informations sur la façon de personnaliser les paramètres, voir [Personnaliser les réglages du logiciel de transfert de données](#).
- Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon type de dispositif. Voir [Personnaliser les réglages du logiciel de transfert de données](#).

Impossible d'accéder à l'application Internet OneTouch Reveal®

Si vous ne parvenez pas à accéder à l'application Internet OneTouch Reveal®, vérifiez les points suivants :

- L'application Internet OneTouch Reveal® est peut-être temporairement indisponible. Si tel est le cas, un message vous invitant à essayer de vous identifier de nouveau dans quelques minutes apparaît. Si le problème persiste, contactez le service client. Pour les coordonnées du support technique, voir [Support technique](#).
- Un pare-feu vous empêche peut-être d'accéder au site. Contactez le support technique de votre ordinateur ou contactez le service client. Pour les coordonnées du support technique, voir [Support technique](#).

REMARQUE : Si vous n'êtes pas en mesure d'accéder aux données de l'application Internet OneTouch Reveal®, vous pouvez accéder aux données de glycémie directement à partir du dispositif de surveillance de la glycémie du patient, ou le patient peut générer un rapport à partir de son application et vous l'envoyer.

Impossible de lier le compte d'un patient

Si vous ne parvenez pas à lier le compte OneTouch Reveal® d'un patient, vérifiez que le compte OneTouch Reveal® du patient est actif.

Aucune donnée n'est affichée dans les rapports de l'application Internet OneTouch Reveal®

Il est possible qu'aucune donnée ne semble disponible lorsque vous consultez ou imprimez les rapports pour une période donnée. Cela peut être dû aux raisons suivantes :

- Vous avez sélectionné une période pour laquelle les données sont insuffisantes. Sélectionnez une nouvelle période pour le rapport.
- Les données ont été supprimées pendant ou après le transfert des données. Lorsque la date est mal réglée dans le dispositif (par exemple, les résultats comportent des dates postérieures), l'application Internet OneTouch Reveal® permet de supprimer ces points de données si les heures et les dates sont incorrectes. Veuillez vérifier le réglage de la date du dispositif et le rapport Liste de données à la rubrique [Rapport Liste de données](#).

Navigateur Internet ou version d'Adobe® Acrobat® Reader® non pris en charge

Votre navigateur Internet et la version d'Adobe® Acrobat® Reader® doivent être répertoriés dans la configuration logicielle requise dans OneTouchReveal.be/support/fr_BE/. Vous pouvez recevoir un message de votre navigateur Internet ou d'Adobe® Acrobat® Reader® lorsque vous utilisez une version non prise en charge.

Vous avez oublié votre mot de passe et ne pouvez pas vous identifier auprès de l'application Internet OneTouch Reveal® (compte verrouillé)

Un compte est verrouillé lorsque vous effectuez cinq tentatives d'identification avec une combinaison de nom d'utilisateur et de mot de passe non valide. Le système verrouille le compte pendant 15 minutes. Vous pouvez ensuite tenter de vous identifier à nouveau. Une combinaison de nom d'utilisateur et de mot de passe valide doit être entrée pour pouvoir accéder au compte.

Si vous avez oublié votre mot de passe, la page d'identification de l'application Internet OneTouch Reveal® inclut le lien **Mot de passe oublié ?**. Cliquez sur le lien et entrez l'adresse électronique que vous avez fournie lorsque vous avez créé votre compte. L'application Internet OneTouch Reveal® vous enverra un e-mail. Suivez les instructions de l'e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.

À propos de

© 2018–2025 LifeScan IP Holdings, LLC.

AW# 07235801M



Fabriqué par:
LifeScan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug
Switzerland

Brevet: <https://www.onetouch.com/patents>

Le programme informatique OneTouch Reveal[®] est protégé par les droits d'auteur. Le téléchargement ou l'achat du logiciel n'octroie pas de licence d'utilisation de tout autre produit LifeScan.

Date de révision: 07-2025

Index

A

[Activation de la fonctionnalité du calculateur d'insuline](#)
[Administrateurs du compte Établissement de santé](#)
[affecter le dispositif d'un patient](#)
[Afficher les rapports d'un patient](#)
[Afficher un rapport différent](#)
[Ajouter le compte d'un utilisateur de l'établissement](#)

C

[Changer le mot de passe](#)
[Changer votre adresse électronique](#)
[Changer votre mot de passe](#)
[Charger les données du dispositif](#)
[Configuration logicielle requise](#)
[Configuration matérielle requise](#)
[Configuration système requise](#)
[Couleurs et symboles utilisés dans les rapports](#)
[Créer le compte d'un patient](#)
[Créer le compte de l'établissement de santé](#)
[Créer un rapport d'invité](#)
[Créez le compte d'un administrateur de l'établissement.](#)
[Créez le compte d'un utilisateur de l'établissement.](#)

D

[Déclasser ment de santé](#)
[Déclasser un établissement](#)
[dépannage](#)
[Dépannage - Navigateur Internet ou Adobe Acrobat Reader non pris en charge](#)
[Dépannage – Aucune donnée n'est affichée](#)
[Dépannage – Compte verrouillé](#)
[Dépannage – Impossible d'accéder à l'application Internet](#)
[Dépannage – Impossible de lier le compte d'un patient](#)
[Dépannage – Impossible de transférer les données](#)
[Désinstaller le logiciel de transfert de données](#)
[Détails des rapports destinés à votre professionnel de santé](#)
[Dispositifs pris en charge](#)
[Droits administratifs](#)

E

[Effacer le dispositif](#)
[Enregistrer des rapports](#)

F

[Fonctionnalité du calculateur d'insuline](#)

G

[glossaire](#)

H

[Hiérarchie des préférences](#)

I

[Icônes de navigation](#)

[Identification](#)

[Impression de rapport](#)

[Imprimer depuis un rapport](#)

[Imprimer des rapports](#)

[imprimer et enregistrer des rapports](#)

[Imprimer le résumé de l'inscription](#)

[Installer le logiciel de transfert de données](#)

L

[Lien du profil](#)
[Lier le compte d'un patient](#)
[Lier un compte à l'établissement de santé](#)
[Logiciel de transfert de données](#)
[Logiciel de transfert de données – Effacer le dispositif](#)
[Logiciel de transfert de données – Installation](#)
[Logiciel de transfert de données – Onglets](#)
[Logiciel de transfert de données – Personnaliser les réglages](#)
[Logiciel de transfert de données – Transférer les données](#)
[Logiciel de transfert de données – Désinstallation](#)

M

[Menu du logiciel de transfert de données](#)
[Menu du logiciel de transfert de données – Afficher les journaux](#)
[Menu du logiciel de transfert de données – Aide](#)
[Menu du logiciel de transfert de données – Effacer le dispositif](#)
[Menu du logiciel de transfert de données – Quitter](#)
[Menu du logiciel de transfert de données – Réglages](#)
[Menu du logiciel de transfert de données – Réglages de communication du dispositif](#)
[Menu du logiciel de transfert de données – Trouver mon dispositif](#)
[Messages liés aux tendances](#)
[Modifier l'identifiant d'un patient](#)
[Modifier l'ordre de tri pour le rapport Carnet](#)
[Modifier la langue d'un patient](#)
[Modifier la période d'un rapport](#)
[Modifier le calendrier des créneaux horaires pour le patient](#)
[Modifier le nom du dispositif d'un patient](#)
[Modifier le profil](#)
[Modifier le rôle d'administrateur de l'établissement](#)
[Modifier les coordonnées de l'utilisateur de l'établissement](#)
[Modifier les coordonnées du patient](#)
[Modifier les informations générales d'un patient](#)
[Modifier les informations générales d'un utilisateur de l'établissement](#)
[Modifier les informations sur l'établissement](#)
[Modifier les objectifs glycémiques](#)
[Modifier les objectifs pour les taux de glucose d'un patient](#)
[Modifier les options d'un rapport](#)
[Modifier les options de votre rapport](#)
[Modifier les options des rapports d'un utilisateur de l'établissement](#)
[Modifier les options du rapport de l'établissement](#)
[Modifier les préférences des rapports d'un utilisateur de l'établissement](#)
[Modifier les préférences des rapports de l'établissement](#)

[Modifier vos coordonnées](#)
[Modifier vos informations générales](#)
[Modifier vos préférences de rapports](#)
[Modifier votre langue](#)

N

[navigation](#)
[Notes de bas de page dans les rapports](#)
[Notifications](#)

O

[Onglet Gérer l'établissement](#)
[Onglet Patients](#)
[Onglet Rapports](#)
[Onglet Utilisateurs de l'établissement](#)

P

[Personnaliser les réglages du logiciel de transfert de données](#)

R

[Rapport - Rapport d'avancement et carnet](#)
[Rapport – Analyse de l'excursion](#)
[Rapport – Analyse de l'observance](#)
[Rapport – Carnet](#)
[Rapport – Liste de données](#)
[Rapport – Résumé des données du patient](#)
[Rapport – Sélectionner](#)
[Rapport – Synthèse par heure de la journée](#)
[Rapport – Synthèse par jour de la semaine](#)
[Rapport Analyse de l'excursion](#)
[Rapport Analyse de l'observance](#)
[Rapport Aperçu de la journée](#)
[Rapport Carnet](#)

[Rapport d'invité](#)
[Rapport journalier](#)
[Rapport Liste de données](#)
[Rapport Résumé des données du patient](#)
[Rapport Synthèse par heure de la journée](#)
[Rapport Synthèse par jour de la semaine](#)
[Rechercher un patient](#)
[Réglages](#)
[Retirer le dispositif d'un patient](#)

S

[Sélectionner l'unité de mesure](#)
[Sélectionner la langue d'un utilisateur de l'établissement](#)
[Sélectionner la langue de l'établissement de santé](#)
[Sélectionner les tâches d'un utilisateur de l'établissement](#)
[Sélectionner un utilisateur de l'établissement](#)
[Support technique](#)
[Supprimer un patient de l'établissement](#)
[Supprimer un utilisateur de l'établissement](#)

T

[Tâches de l'onglet Gérer l'établissement de santé](#)
[Tâches de l'onglet Patients](#)
[Tâches de l'onglet Rapports](#)
[Tâches de l'onglet Utilisateurs du compte Établissement de santé](#)
[télécharger un rapport](#)
[Transférer des données](#)

U

[Utilisateurs de l'établissement](#)
[Utilisation prévue](#)