

Gebruik deze verkorte handleiding om vertrouwd te raken met de meter en volg de hierin beschreven stappen om met testen te beginnen.

BELANGRIJK: Lees de Gebruikershandleiding die bij uw systeem is geleverd.

Meterpictogrammen

-  Bluetooth® ingeschakeld
-  Synchroniseren
-  Resultaat controlevloeistof
-  Batterij bijna leeg
-  Voortgangspuntjes schermnavigatie

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor symbolen en pictogrammen op de meter en hun betekenis.

Contacteer onze gratis OneTouch®-lijn via 0800 15325 (België) of bezoek onze website www.OneTouch.be. Lijnen open van maandag tot vrijdag van 8.00u tot 17.00u.

Vervaardigd door:
LifeScan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug
Switzerland



LifeScan Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 18
40547 Duesseldorf, Germany



OneTouch®
AW 07180902A
© 2018–2023 LifeScan
IP Holdings, LLC
Revisedatum: 03/2023






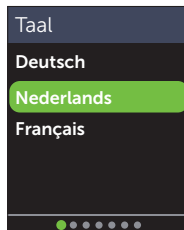
Lifescan

1 Uw meter instellen


Zet de meter aan

Houd  ingedrukt totdat het welkomtscherm verschijnt.

Gebruik  en  om elke instelling aan te passen en druk op  om te bevestigen.



Stel de taal in

Selecteer de door u gewenste taal en druk op .

Optioneel: Stel de meter in met de OneTouch Reveal® mobiele app*


Selecteer **Ja** om de instellingen te doorlopen met de app.




Download de OneTouch Reveal® mobiele app voordat u uw meter en mobiele apparaat aan elkaar koppelt.



Stel de tijd in

Druk op  als de tijd juist is of pas aan en bevestig.

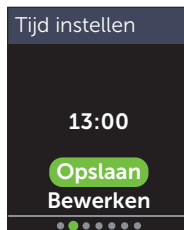


* Ga naar www.OneTouch.be voor meer informatie over de OneTouch Reveal® mobiele app en om te zien of deze app in uw land verkrijgbaar is.


Stel de datum in

Druk op  als de datum juist is of pas aan en bevestig.




Stel de grenswaarden voor het bereik bij maaltijden in

Druk op  als de vooraf ingestelde grenswaarden Vóór Maaltijd en Na Maaltijd juist zijn of pas aan en bevestig.

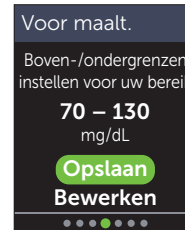

Stel de Test Tracker in

Druk op  als het vooraf ingestelde doel juist is of pas aan en bevestig.

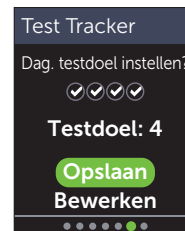

Stel het Doelgemiddelde voor 90 dagen in


Druk op  als het Doelgemiddelde voor 90 dagen juist is of pas aan en bevestig.



OPMERKING: Bespreek met uw arts/diabetesverpleegkundige welke grenswaarden, Dagelijks Testdoel en Doelgemiddelde voor 90 dagen geschikt zijn voor u.

2 Een test uitvoeren

Was uw handen met warm water en zeep en spoel en droog af voordat u een bloeddruppel afneemt. Verwijder de dop van de prikpen en plaats vervolgens een steriel lancet. Draai het beschermdopje. Plaats de dop weer op de prikpen.

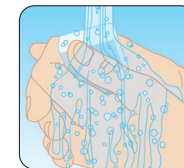


Zilverkleurige teststripteinden



Teststrippoot


Plaats een teststrip (met blauwe kant en de 2 zilverkleurige teststripteinden naar u gericht) om de meter in te schakelen.

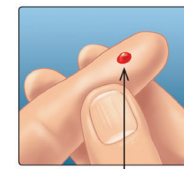

Grootte bij benadering

Stel de diepte op de prikpen in. Span de prikpen aan en houd deze stevig tegen de zijkant van uw vinger. Druk op de ontspanknop. Knijp zachtjes in uw vinger om een ronde druppel bloed te verkrijgen.

Breng de bloeddruppel aan op het kanaaltje op één van beide zijden van de teststrip.

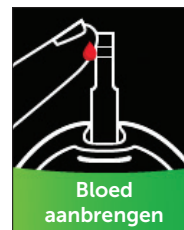

Bloed aanbrengen


Zodra het kanaaltje is gevuld, wordt het rood en verschijnt uw resultaat binnen ongeveer 5 seconden.

3 Uw resultaat bekijken

ColourSure® Dynamische Bereikindicator

De ColourSure® Dynamische Bereikindicator laat u direct weten of uw resultaat onder (blauw), binnen (groen) of boven (rood) uw grenswaarden ligt. De Bereikindicator geeft ook aan of uw resultaat dicht bij de onder- of bovengrens van uw streefwaardenbereik zit. Een tekstballon of emoji wijst naar een segment op de kleurenbalk.

Voorbeelden van resultaten

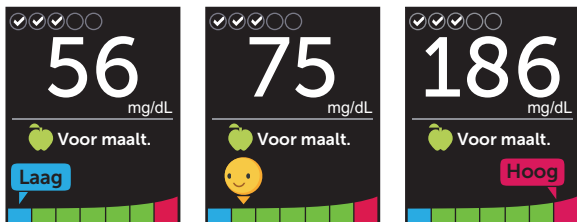

Maaltijd en Gebeurtenismarkeringen


Een Markering Vóór Maaltijd (🍏) wordt automatisch op uw resultaat toegepast. U kunt uw maaltijdmarkering veranderen in een Markering Na Maaltijd (🍏) en een Gebeurtenismarkering toevoegen.



Bloedsuiker Coach (Blood Sugar Mentor®) meldingen

De Bloedsuiker Coach (Blood Sugar Mentor®) geeft inzicht in hoe het met u gaat en biedt begeleiding voor het onder controle houden van uw diabetes, inclusief informatieve en motiverende berichten op basis van uw huidige en eerdere glucoseresultaten en andere bijgehouden gegevens.

Voorbeelden van Bloedsuiker Coach (Blood Sugar Mentor®) meldingen

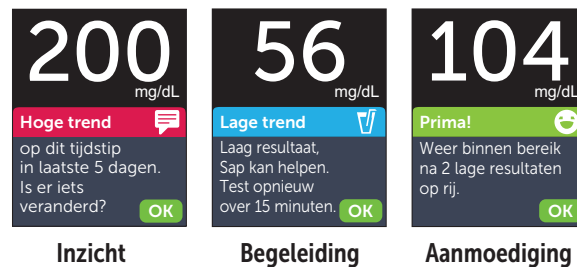

Het **Bluetooth®** woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik door LifeScan Scotland Ltd. van dergelijke merken valt onder de licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

4 Verbinding maken met een mobiel apparaat




Met **Bluetooth®** technologie kunt u draadloos uw resultaten naar een mobiel apparaat versturen waarop u met de OneTouch Reveal® app uw resultaten kunt bekijken en in een grafiek kunt weergeven, Dagelijkse Testdoelen kunt instellen (zie Bloedsuiker Coach (Blood Sugar Mentor®) meldingen) en trends kunt ontdekken.

Selecteer in het menu Instellingen de optie **Bluetooth** en druk op **OK**.

Een ✓ geeft aan of **Bluetooth®** momenteel is ingesteld op Aan of Uit.

Druk op **↶** of **↷** om de **Bluetooth®** status te wijzigen in Aan en druk op **OK**.

Voer de weergegeven PIN in als het mobiele apparaat daar om vraagt.

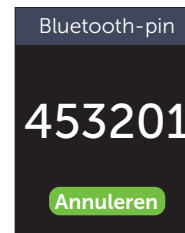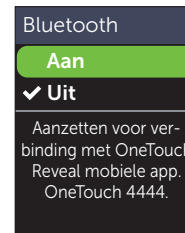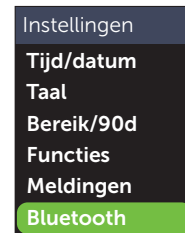

Voorbeeld PIN

Registreer uw meter voor hulp en ondersteuning:
OneTouch.be/welkom



ONETOUCH
Ultra Plus Reflect®

Bloedglucosesysteem

Verkorte handleiding



AW 07180902A